

INNOVATE
THE GAME



POUR UN
WORKFLOW
PLUS
EFFICACE

CHAMPIONS CATALOGUE DE PRODUITS

– *Le système implantaire complet* –

CHAMPIONS 

TABLE DES MATIÈRES

Service | Page 4

Champions Instruments | Page 7

Trousse de chirurgie | Page 8

Trousse de chirurgie CA | Page 10

Forets | Page 12

Butées pour foret | Page 15

Condenseurs | Page 16

Smart Grinder | Page 19

Champions (R)Evolution | Page 25

Vis hybrides | Page 28

Porte-implants | Page 30

Prep-Caps | Page 34

Piliers de cicatrisation | Page 37

Piliers standards | Page 40

Piliers massifs préparables (Hexadapter) | Page 42

Piliers massifs préparables (avec filetage) | Page 43

Piliers Tête boule | Page 44

Piliers Preform | Page 44

Piliers CEREC | Page 45

ICA-Piliers et -Caps | Page 46

Multi-Unit | Page 48

LOC Locator | Page 52

Docklocs | Page 52

Attachements | Page 53

Équipement de laboratoire et empreinte | Page 54

Champions Tête carrée | Page 59

Porte-implants | Page 62

Prep-Caps | Page 63

LOC Locator | Page 65

Docklocs | Page 65

Équipement de laboratoire et empreinte | Page 66

Champions Tête boule | Page 69

Porte-implants | Page 71

Prep-Cap | Page 71

Rescue-Cap | Page 72

Attachements | Page 73

Équipement de laboratoire et empreinte | Page 73

Champions Accessoires | Page 75

Outils | Page 76

Matériaux de régénération | Page 77

Accessoires | Page 78

Heydent | Page 79

Les produits et les désignations présentés dans ce catalogue sont en partie protégés par des marques, des brevets, et des droits d'auteur. L'absence d'une référence spéciale ou du symbole ® ou TM ne signifie pas qu'aucune protection légale n'existe. Vous pouvez trouver un aperçu via le code QR.



Les informations du fabricant conformément à MDD (Medical Device Directive [directive relative aux dispositifs médicaux]) / MDR (Medical Device Regulation [réglementation relative aux dispositifs médicaux]) sont indiquées sur l'étiquette du produit.

NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

TOUT POUR VOS COMMANDES



Lundi, Mardi, Jeudi
7h30 à 18h00

Mercredi
7h30 à 16h00

Vendredi
7h30 à 14h00



+49 (0)6734 91 40 80



info@champions-implants.com



Champions-Implants GmbH
Champions Platz 1 | D-55237 Flonheim




Profitez de notre Champions Online-Shop
(boutique en ligne)

Vos avantages :

- Disponible à tout moment
- Rapide et simple
- Modèles de commandes personnalisés
- Historique des commandes

champions-implants.shop

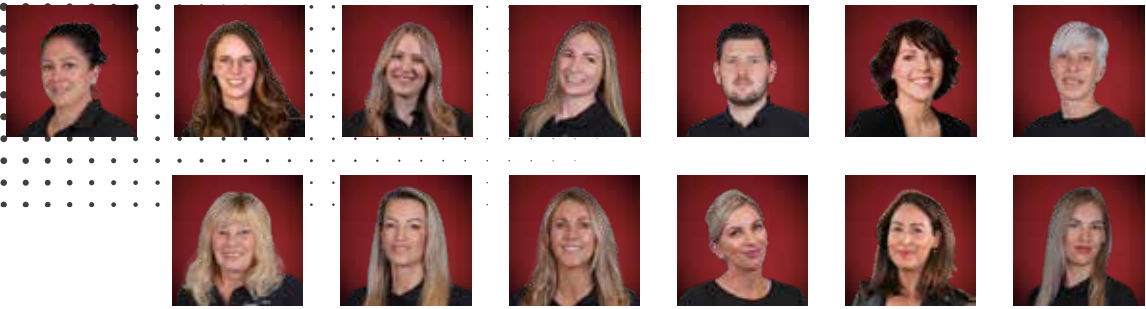

Vos avantages chez Champions



Délais de livraison courts

Les livraisons dans l'UE sont effectuées en 1 à 3 jours ouvrables.



Réponse rapide garantie

Nous mettons tout en œuvre pour traiter vos demandes dans les plus brefs délais.



Des conseils d'experts

Notre Service Clientèle possède une connaissance approfondie de nos dispositifs médicaux et vous accompagne dans le respect des exigences du règlement d'application de la législation sur les dispositifs médicaux (MPDG – Medizinproduktegesetz).



Un service client à votre écoute

Forte d'une collaboration de longue date, notre équipe a bâti une relation de confiance avec la plupart de nos clients.



Prix


Les prix des produits sont visibles dans notre Online-Shop (boutique en ligne) après inscription, ou les listes des prix sont disponibles sur demande auprès de notre Service Clientèle.



Conditions Générales de Ventes (CGV)

Nos CGVs sont consultables sur notre site web à :



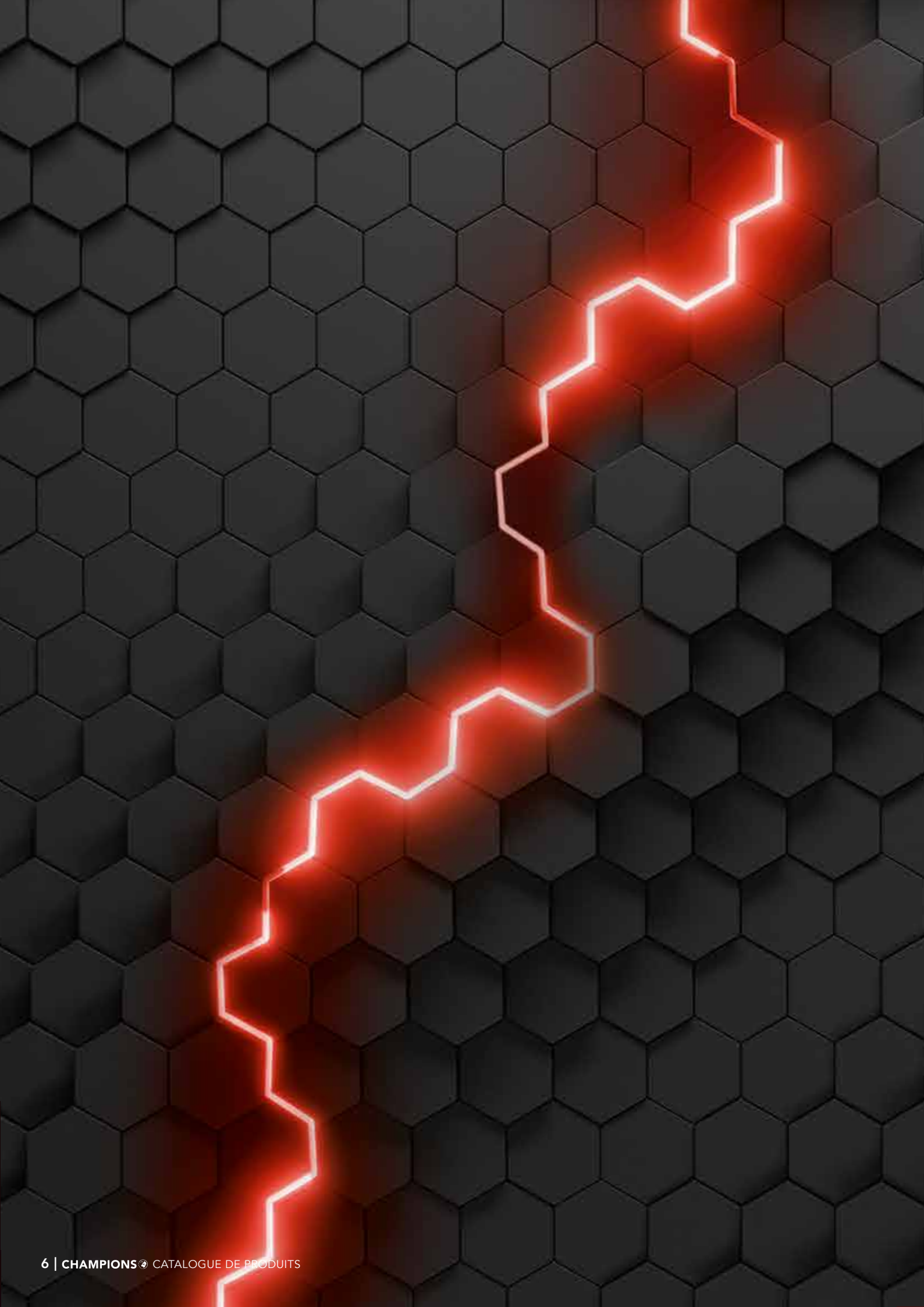

CHAMPIONS INSTRUMENTS


- Trousse de chirurgie -



Trousse de chirurgie

La trousse de chirurgie pour la pose des implants Champions est compacte, ce qui facilite son rangement et son stockage. Sa manipulation est simple grâce à ses marquages en couleurs et son étiquetage.


La trousse a été conçue pour une décontamination et une stérilisation optimales.

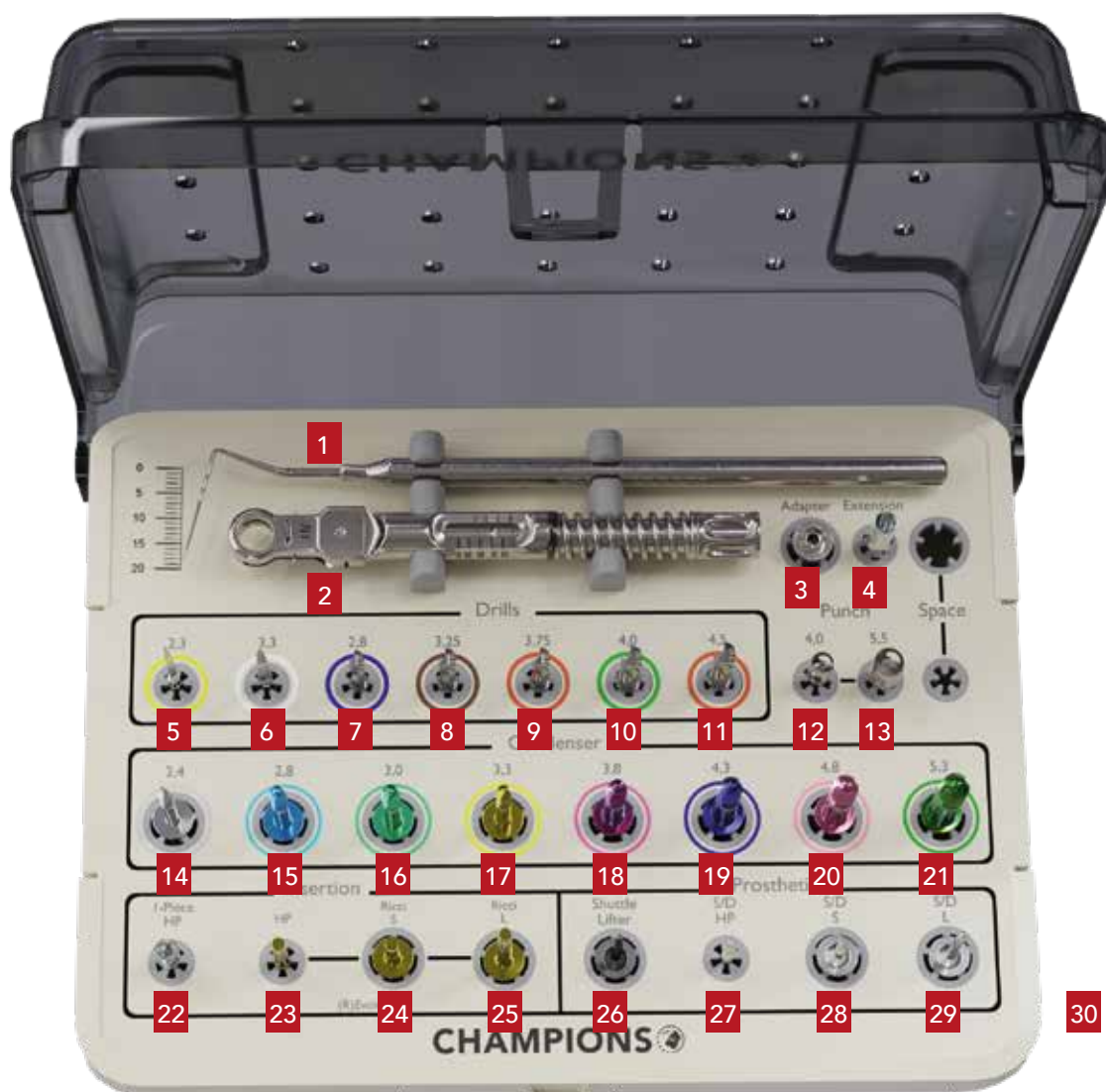

Trousse de chirurgie complète

REF: 3193

Position	Instruments	REF
1	Sonde CCO (Contrôle de la Cavité Osseuse)	3180
2	Clé dynamométrique	3090
3	Adaptateur de clé dynamométrique	3061
4	Prolongateur de foret	3036
5	Foret pyramidal jaune, long ø 2,3 mm	3000
6	Foret pyramidal blanc ø 3,3 mm	3030
7	Foret hélicoïdal bleu ø 2,8 mm	3031
8	Foret hélicoïdal brun ø 3,25 mm	3032
9	Foret hélicoïdal orange ø 3,75 mm	30331
10	Foret hélicoïdal vert ø 4,0 mm	3034
11	Foret hélicoïdal rouge ø 4,5 mm	30345
12	Mucotome ø 4,0 mm	3088
13	Mucotome ø 5,5 mm	3089
14	Condenseur argenté ø 2,4 mm	3065
15	Condenseur bleu clair ø 2,8 mm	30651
16	Condenseur vert ø 3,0 mm	3066
17	Condenseur jaune ø 3,3 mm	30661
18	Condenseur violet ø 3,8 mm	3067
19	Condenseur bleu ø 4,3 mm	3068
20	Condenseur rosé ø 4,8 mm	30681
21	Condenseur vert ø 5,3 mm	3069
22	Porte-implant Connexion CA	3039
23	Porte-implant Champions (R)Evolution Connexion CA	3063
24	Porte-implant Champions (R)Evolution court, « Ricci I »	30631
25	Porte-implant Champions (R)Evolution long, « Ricci II »	30632
26	Extracteur Shuttle	3087
27	Tournevis de prothèse / Tournevis court, Connexion CA	30862
28	Tournevis de prothèse / Tournevis court	30861
29	Tournevis de prothèse / Tournevis long	3086
30	Trousse chirurgicale M	3190-5

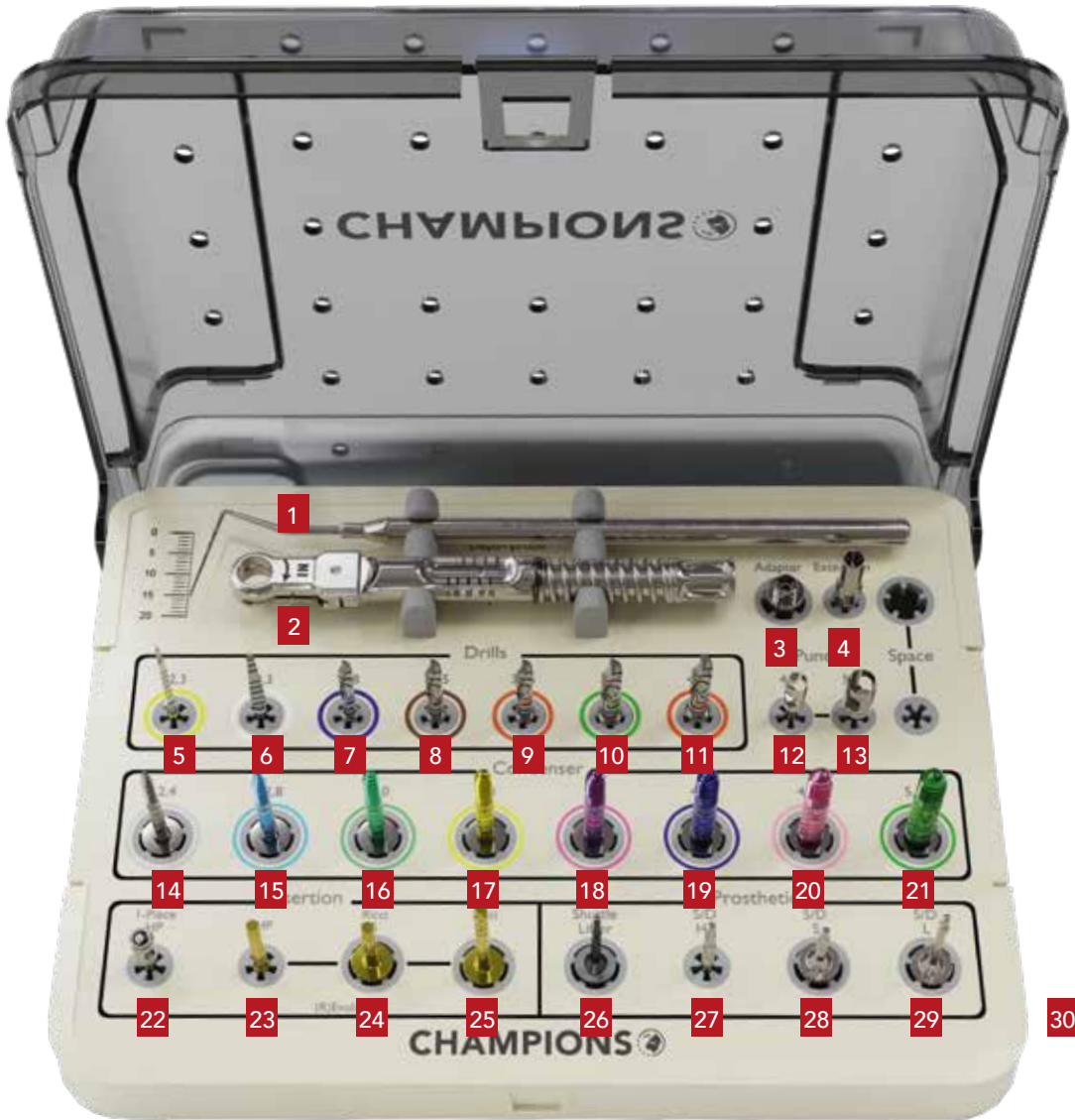

Trousse de chirurgie CA complète

REF: 3194

Position	Instruments	REF
1	Sonde CCO (Contrôle de la Cavité Osseuse)	3180
2	Clé dynamométrique	3090
3	Adaptateur de clé dynamométrique	3061
4	Prolongateur de foret	3036
5	Foret pyramidal jaune, long ø 2,3 mm	3000
6	Foret pyramidal blanc ø 3,3 mm	3030
7	Foret hélicoïdal bleu ø 2,8 mm	3031
8	Foret hélicoïdal brun ø 3,25 mm	3032
9	Foret hélicoïdal orange ø 3,75 mm	30331
10	Foret hélicoïdal vert ø 4,0 mm	3034
11	Foret hélicoïdal rouge ø 4,5 mm	30345
12	Mucotome ø 4,0 mm	3088
13	Mucotome ø 5,5 mm	3089
14	Condenseur argenté CA ø 2,4 mm	3072
15	Condenseur bleu clair CA ø 2,8 mm	3073
16	Condenseur vert CA ø 3,0 mm	3074
17	Condenseur jaune CA ø 3,3 mm	3075
18	Condenseur violet CA ø 3,8 mm	3076
19	Condenseur bleu CA ø 4,3 mm	3077
20	Condenseur rosé CA ø 4,8 mm	3078
21	Condenseur vert CA ø 5,3 mm	3079
22	Porte-implant Connexion CA	3039
23	Porte-implant Champions (R)Evolution Connexion CA	3063
24	Porte-implant Champions (R)Evolution court, « Ricci I »	30631
25	Porte-implant Champions (R)Evolution long, « Ricci II »	30632
26	Extracteur Shuttle	3087
27	Tournevis de prothèse/Tournevis court, Connexion CA	30862
28	Tournevis de prothèse/Tournevis court	30861
29	Tournevis de prothèse/Tournevis long	3086
30	Trousse chirurgicale M	3190-5



Respectivement avec manchon adaptateur pour trousse de chirurgie REF 3190A

Forets

Les forets pyramidaux Champions possèdent 3 faces planes (REF 3005, 3000, 3030). Appropriés au protocole d'insertion MIMI, ils sont particulièrement adaptés pour un passage transmuqueux. Ces derniers passent la muqueuse sans la blesser, de plus ils retirent très peu d'os à contrario des forets hélicoïdaux. Nous conseillons une utilisation à vitesse réduite comprise entre 250 rpm (corticale) et 70 rpm afin de ne pas échauffer l'os et de mieux guider le foret. Les marquages laser (ML) permettent un contrôle exact par l'opérateur de la profondeur de forage. Le marquage laser peut également servir à mesurer l'épaisseur gingivale avant le premier forage.



Forets pyramidaux



Foret pyramidal jaune (court)
ML: 2/4/6/10/12/14

Foret pyramidal jaune (long)
ML: 2/4/6/10/12/14/16/18/20

Foret pyramidal blanc
ML: 2/4/6/10/12/14/16/18

Diamètre	2,0 mm	2,3 mm	3,3 mm
Longueur	14,0 mm	20,0 mm	18,0 mm
REF	3005	3000	3030

Forets hélicoïdaux



Foret hélicoïdal bleu
ML: 2/4/6/10/12/14/16

Foret hélicoïdal brun
ML: 2/4/6/10/12/14/16

Foret hélicoïdal orange
ML: 2/4/6/10/12/14/16

Foret hélicoïdal vert
ML: 2/4/6/10/12/14/16

Foret hélicoïdal rouge
ML: 2/4/6/10/12/14/16

Diamètre	2,8 mm	3,25 mm	3,75 mm	4,0 mm	4,5 mm
Longueur	18,0 mm	18,0 mm	18,0 mm	18,0 mm	18,0 mm
REF	3031	3032	30331	3034	30345

Forets



Foret orange
ML: 6/8,
pour ø 4,0 mm

Foret noir
ML: 6/8,
pour ø 4,0 mm

Foret blanc
ML: 6/8,
pour ø 4,0 mm

Foret jaune
ML: 6/8,
pour ø 4,0 mm

Diamètre	3,7 mm	5,0 mm	5,5 mm	6,0 mm
Longueur	10,0 mm	10,0 mm	10,0 mm	10,0 mm
REF	3033	30346	30347	30348

Accessoires



Mucotome petit

Mucotome grand

Prolongateur de foret
utilisable pour tous les forets
Champions et condenseurs
Connexion CA
Torque max : 50 Ncm

Diamètre	4,0 mm	5,5 mm	3,5 mm
Longueur	8,0 mm	8,0 mm	10 mm
REF	3088	3089	3036

Butées pour foret

La butée pour foret, un complément de foret, vous apportera une sécurité et un confort supplémentaires lors de l'implantation. Pratique : la butée pour foret peut être coupée à l'aide d'un scalpel suivant les repères positionnés tous les 2 mm. Recommandation : faire attention avant l'utilisation à l'axe d'insertion. Les butées pour foret sont préconisées par le Dr. Jean-Pierre Chetry, Diplômé de la faculté de médecine de Marseille, d'Implantologie Chirurgicale et Prothétique. Ceux avec l'ajout « JP » sont nommés d'après le Prof. Dr. Jean-Pierre Bernard, leader en implantologie, responsable du service d'implantologie de l'École Dentaire de Genève.

De REF 3091 à REF 3093: Lorsque vous mettez la butée pour foret sur le foret pyramidal, assurez-vous que la partie plate du bout de la butée pour foret est en position parallèle avec la partie plate du foret pyramidal.
De REF 3094 à REF 3097: Les quatre rainures à l'extrémité de la butée pour foret doivent être poussées sur le foret hélicoïdal jusqu'à l'arrêt.

Matériau: plastique stérilisable/PEEK



« Chetry » jaune
(Foret-REF 3000)

« Chetry » jaune
« JP7Y »
(Foret-REF 3000)

« Chetry » jaune
« JP9Y »
(Foret-REF 3000)

« Chetry » noir
(pour foret noir
pyramidal)

« Chetry » blanc
(Foret-REF 3030)

« Chetry » bleu
(Foret-REF 3031)

Diamètre

5,0 mm

7,0 mm

9,0 mm

5,0 mm

5,0 mm

5,0 mm

Longueur

12,0 mm

12,0 mm

12,0 mm

10,0 mm

10,0 mm

10,0 mm

REF

3091

30911

30912

3092

3093

3094



« Chetry » bleu
« JP7B »
(Foret-REF 3031)

« Chetry » bleu
« JP9B »
(Foret-REF 3031)

« Chetry » brun
(Foret-REF 3032)

« Chetry » orange
(Foret-REF 30331)

« Chetry » vert
(Foret-REF 3034)

« Chetry » rouge
(Foret-REF 30345)

Diamètre

7,0 mm

9,0 mm

6,0 mm

6,0 mm

6,0 mm

6,5 mm

Longueur

10,0 mm

10,0 mm

10,0 mm

10,0 mm

10,0 mm

10,0 mm

REF

30941

30942

3095

30951

3096

3097

Condenseurs

Les condenseurs permettent la condensation osseuse notamment dans le cas de l'os de faible densité (D3 & D4) et de vérifier le diamètre d'implant à poser dans l'os de faible densité ou dans le cas d'une extraction-implantation immédiate. Selon l'implantation MIMI, les condenseurs sont également utilisés lorsque l'épaisseur gingivale est > 4 mm et pour la pose d'un implant Champions (R)Evolution bibloc et d'un «New Art» à partir de \varnothing 3,0 mm. Important : Réalisez le «CCO» (Contrôle de la Cavité Osseuse) en vérifiant l'intégralité des parois de la cavité de forage avec une sonde parodontale fine pour ensuite correctement poser l'implant dans la cavité osseuse préparée. En secteur sous sinusien (Sinus Lift Interne Direct [IDS]) : après le forage avec le foret jaune, ne PAS utiliser les condenseurs de 2,8 et 2,4 mm de diamètre (risque de perforation). Les condenseurs sont réutilisables après nettoyage et stérilisation entre chaque intervention.



La conception du condenseur :
Exemple : Vue du condenseur bleu \varnothing 4,3 mm, longueur 24 mm) (REF 3077). Les autres condenseurs sont conçus selon le même schéma. Le diamètre indiqué se réfère à la partie à partir de 10 mm.

**Condenseurs
Connexion
à la clé
dynamo-
métrique**




	Condenseur argenté, court	Condenseur argenté, long	Condenseur bleu clair	Condenseur vert	Condenseur jaune, court	Condenseur jaune, long	Condenseur violet	Condenseur bleu	Condenseur rosé	Condenseur vert
Diamètre	2,4 mm	2,4 mm	2,8 mm	3,0 mm	3,3 mm	3,0 mm	3,8 mm	4,3 mm	4,8 mm	5,3 mm
Longueur	24,0 mm	34,0 mm	24,0 mm	24,0 mm	24,0 mm	34,0 mm	24,0 mm	24,0 mm	24,0 mm	24,0 mm
REF	3065	30650	30651	3066	30661	30660	3067	3068	30681	3069

**Condenseurs
Connexion
CA**



	Condenseur argenté Connexion CA	Condenseur bleu clair Connexion CA	Condenseur vert Connexion CA	Condenseur jaune Connexion CA	Condenseur violet Connexion CA	Condenseur bleu Connexion CA	Condenseur rosé Connexion CA	Condenseur vert Connexion CA	Manchon adaptateur CA pour trousse de chirurgie	Porte-fraises Plug'In 8 Matériau : acier inoxydable
Diamètre	2,4 mm	2,8 mm	3,0 mm	3,3 mm	3,8 mm	4,3 mm	4,8 mm	5,3 mm		
Longueur	24,0 mm	24,0 mm	24,0 mm	24,0 mm	24,0 mm	24,0 mm	24,0 mm	24,0 mm		4,5 x 2 x 4 cm
REF	3072	3073	3074	3075	3076	3077	3078	3079	3190A	4312

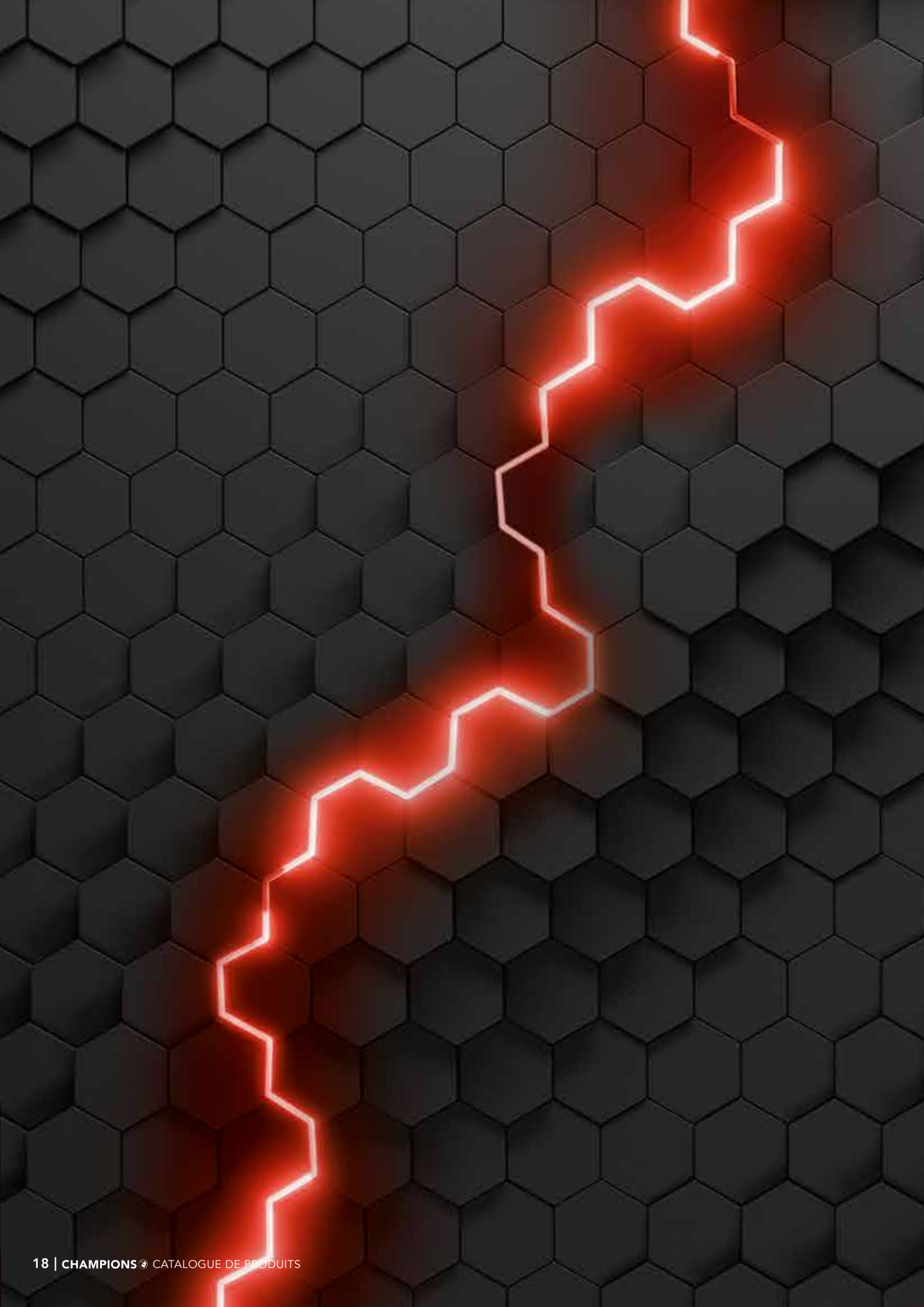

SMART GRINDER

– Smart Grinder & accessoires –



Smart Grinder

Le Smart Grinder est un dispositif permettant de réaliser une greffe autologue à partir des dents extraites du patient. Le protocole se décompose en plusieurs étapes (nettoyage dent, broyage, tamisage, décontamination, tampon phosphate) et dure quelques minutes. L'utilisation du Smart Grinder s'intègre parfaitement dans le cadre d'un traitement de préservation d'os alvéolaire ou de comblement. Le procédé est éprouvé scientifiquement.

Le kit complet se compose d'une base principale et de 6 kits patients comprenant une chambre de broyage et des solutions de décontamination.



STEP BY STEP



Nettoyage

Chambre de broyage

Tiroirs
permettant
de collecter le
broyat dentaire

Bouton de
commande pour
le broyage



Broyage
en 3 secondes
(préréglage)



Broyat dentaire obtenu
après le procédé de triage
(préréglage)



Préparation avec
Cleanser® & PBS
en < 6 minutes



Mise en place
du greffon



Smart Grinder GENESIS Complete Kit (kit complet)

- 1 x Smart Grinder GENESIS
Dispositif de base
- 6 x Chambres de broyage (usage unique, individuel pour chaque patient)
- 6 x Récipients pour particules
- 6 x Cleanser (nettoyant) 5 ml
- 6 x PBS (solution saline tamponnée au phosphate) 5 ml

REF 4300G

Smart Grinder GENESIS

- 1 x Smart Grinder GENESIS
Dispositif de base

REF 4301G



Chamber Kit

- 6 x Chambres de broyage (usage unique, individuel pour chaque patient)
- 6 x Récipients pour particules
- 6 x Cleanser (nettoyant) 5 ml
- 6 x PBS (solution saline tamponnée au phosphate) 5 ml

REF 4302





Cleanser Kit

6 x Cleanser (nettoyant) 5 ml

6 x PBS (solution saline tamponnée au phosphate)
5 ml

REF 43041




Dentin Graft Accelerator

6 x EDTA 5 ml

REF 4304



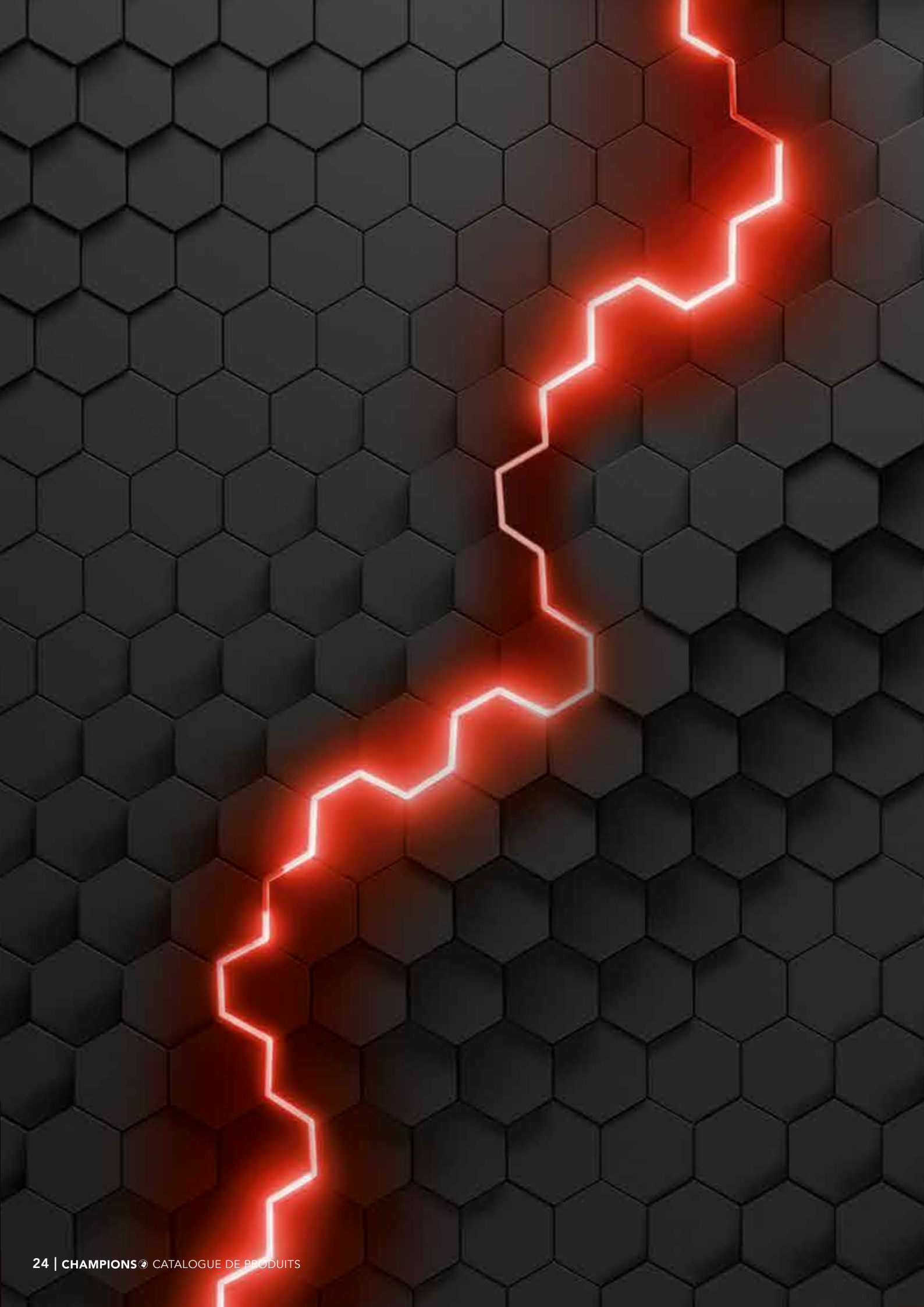


CHAMPIONS (R)EVOLUTION

- Chirurgie & Prothèse -



Champions (R)Evolution

L'implant Champions (R)Evolution est un implant bibloc endo-osseux, symétrique en rotation, et composé de titane grade 4. Livré avec un Shuttle et une vis de fixation montés en production, cet implant peut être posé dans toutes les qualités osseuses dans la mandibule et le maxillaire (D1–D4), avec ou sans augmentation.

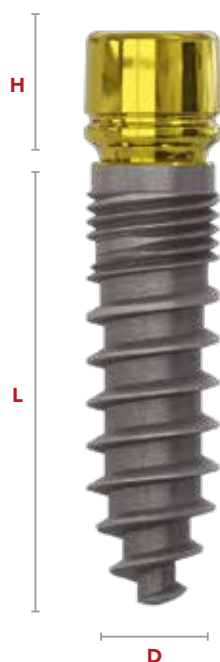

Diamètre	Longueur	Hauteur	REF
3,5 mm	6,5 mm	3,5 mm	0800
	8,0 mm	3,5 mm	0815
	10,0 mm	3,5 mm	0830
	12,0 mm	3,5 mm	0845
	14,0 mm	3,5 mm	0860
4,0 mm	16,0 mm	3,5 mm	0875
	6,5 mm	3,5 mm	0802
	8,0 mm	3,5 mm	0817
	10,0 mm	3,5 mm	0832
	12,0 mm	3,5 mm	0847
4,5 mm	14,0 mm	3,5 mm	0862
	16,0 mm	3,5 mm	0877
	6,5 mm	3,5 mm	0805
	8,0 mm	3,5 mm	0820
	10,0 mm	3,5 mm	0835
5,0 mm	12,0 mm	3,5 mm	0850
	14,0 mm	3,5 mm	0865
	16,0 mm	3,5 mm	0880
	6,5 mm	3,5 mm	0807
	8,0 mm	3,5 mm	0822
5,5 mm	10,0 mm	3,5 mm	0837
	12,0 mm	3,5 mm	0852
	14,0 mm	3,5 mm	0867
	16,0 mm	3,5 mm	0882
	6,5 mm	3,5 mm	0810
5,5 mm	8,0 mm	3,5 mm	0825
	10,0 mm	3,5 mm	0840
	12,0 mm	3,5 mm	0855
	14,0 mm	3,5 mm	0870
	16,0 mm	3,5 mm	0885

Cône interne de 9,5°
Excellente connexion
implant-pilier, hermétique
aux bactéries

(étude Zipprich de
l'Université de Francfort)


Microspires crestales
pour une stabilité
primaire maximale

Titane grade 4
99% de titane



Le Shuttle réunit
4 fonctions :

- Outil d'insertion
- Vis de cicatrisation
- Conformateur gingival
- Outil d'empreinte

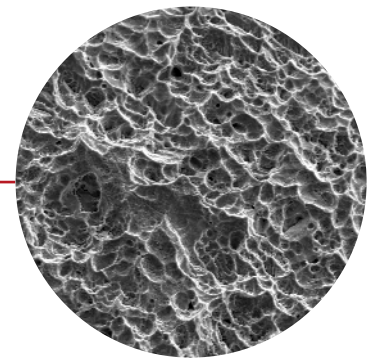

Surface de Champions –
une des meilleures!

(étude Dr. Duddeck,
Clinique Universitaire Cologne)

Vis hybrides



Vis hybride Georgi GH 0,5

La vis hybride Georgi GH 0,5 est utilisée lorsqu'il y a une hauteur gingivale < 2 mm ou si une mise en nourrice complète de l'implant est réalisée. Le Gingiva-Shuttle avec Gingiva-Clix peut être mis en place à nouveau sous anesthésie locale au plus tôt après 8 semaines pour travailler le profil d'émergence. En règle générale, une exposition de l'implant est nécessaire. Cicatrisation sans mise en charge : des forces de cisaillement latérales ne s'exercent pas sur l'implant.

ø 3,5 mm, Hauteur : 0,5 mm

Torque maximum : 15 Ncm

Matériau : titane grade 5

REF : 30851

Les **vis hybrides Georgi GH 1,5 et Georgi GH 2,5** sont utilisées au lieu du Shuttle dans le cas d'une hauteur gingivale réduite < 4 mm ou lorsqu'une mise en nourrice complète de l'implant est réalisée.

Attention : Pour utiliser les vis hybrides il est nécessaire de retirer le Shuttle et la vis à l'intérieur de celui-ci.

ø 3,9 mm

Hauteur à partir de la plateforme de l'implant

Torque maximum : 15 Ncm

Matériau : titane grade 5



Georgi GH 1,5



Georgi GH 2,5

Diamètre	3,9 mm	3,9 mm
Hauteur	1,5 mm	2,5 mm
REF	30853	30854

Désigné d'après Georgi Aleksandrov,
un utilisateur Champions qui a lancé
le développement des vis hybrides.



MISE EN PLACE SUIVANT LES HAUTEURS GINGIVALES :

Georgi GH 0,5

Georgi GH 1,5

Georgi GH 2,5

Shuttle GH 3,5



Porte-implants

Ces porte-implants permettent la pose des implants Champions (R)Evolution avec ou sans Shuttle. Les implants peuvent être posés à l'aide de la clé dynamométrique et des porte-implants (court : REF 30631, long : REF 30632) ou avec un micromoteur et le porte-implant connexion contre-angle (REF 3063). Les implants Champions (R)Evolution avec Shuttle retiré sont posés à l'aide des porte-implants connexion contre-angle Ricci III et Ricci IV (REF 30637, 30638, et 30639). En achevant l'insertion de l'implant : assurez-vous qu'une des deux encoches du porte-implant (entourée ci-dessous en rouge) soit dans une position vestibulaire ou mésiale.

Marquages laser (ML) mesurés à partir de la plateforme de l'implant

Matériau : acier inoxydable



Connexion CA Champions (R)Evolution®
(pose avec Shuttle)
torque max. avec contre-angle sans Hex : 50 Ncm

Connexion CA Champions (R)Evolution®
(pose avec Shuttle retiré)
torque max. avec contre-angle sans Hex : 50 Ncm

Champions (R)Evolution® court
« Ricci I »

Champions (R)Evolution® long
« Ricci II »

Champions (R)Evolution® 2 court
« Ricci III »
ML: 2/4/6
(avec Shuttle retiré)

Champions (R)Evolution® 2 long
« Ricci IV »
ML: 2/4/6
(avec Shuttle retiré)

Diamètre	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
Longueur	12,0 mm	17,0 mm	10,0 mm	20,0 mm	15,0 mm	25,0 mm
REF	3063	30637	30631	30632	30638	30639

* préconisé par le confrère chirurgien-dentiste français, le Dr. Jean-Paul Ricci (Marseille)

Adaptateur de clé dynamométrique

L'adaptateur de clé dynamométrique se positionne sur les porte-implants connexion contre-angle (REF 3063 et REF 30637) afin de pouvoir utiliser le porte-implant avec la clef dynamométrique. Dans l'os de faible densité (site du sinus), l'adaptateur de clé dynamométrique est également positionné sur les condenseurs à connexion contre-angle ou sur les forets. Ø 4,7 mm | L 3,7 mm

Matériau : acier inoxydable

REF 3061





Instrument de vissage Multi-Unit

Instrument pour visser le pilier Multi-Unit sur les implants Champions (R)Evolution®.
 Ø 4,9 mm | L 13,0 mm
 Matériau : acier inoxydable
REF 3062

Outil de positionnement Multi-Unit

REF 31140

Tournevis de prothèse/Tournevis

Instrument pour dévisser ou visser la vis de fixation
 Matériau : acier inoxydable



Tournevis de prothèse court

Tournevis de prothèse long

Tournevis de prothèse connexion CA, court

Diamètre	1,9 mm	1,9 mm	1,9 mm
Longueur	14,0 mm	21,0 mm	15,0 mm
REF	30861	3086	30862

Extracteur Shuttle

Outil pour désinsertion du Gingiva-Shuttle. Pour retirer le Shuttle de l'implant : l'extracteur Shuttle est vissé dans le sens du vissage. Utiliser une clé dynamométrique seulement lorsque le Shuttle ne peut pas être retiré manuellement.

Matériau : acier inoxydable



	Extracteur Shuttle court	Extracteur Shuttle long
Diamètre	1,9 mm	1,9 mm
Longueur	20,0 mm	25,0 mm
REF	3087	3087L

Outil Rescue

pour dévisser la vis de fixation en cas de défektivité de la tête de vis. L'outil Rescue est vissé contre le sens du vissage pour retirer la vis.

En cas de fracture de la vis de fixation, un kit gratuit pourra être demandé.

Matériau : acier inoxydable



	Outil Rescue court	Outil Rescue long
Diamètre	3,4 mm	3,4 mm
Longueur	10,0 mm	18,0 mm
REF	3064	30641

Prep-Caps

Prep-Caps avec col élargi

Les Prep-Caps permettent de corriger les divergences d'insertion, ils peuvent s'utiliser facultativement sur les implants Champions monoblocs à tête carrée (Classic et New-Art) ainsi que sur l'implant Champions (R)Evolution en combinaison avec un pilier Prep-Cap REF 3107.



Matériau : voir tableau

Explication des chiffres : voir diagramme



-2/+2 (0°)

-2/+2 (10°)


+1/0 (5°)

+2/+2 (0°)

+2/+2 (10°)

Diamètre	5,4 mm	5,4 mm	5,4 mm	5,4 mm	5,4 mm
Hauteur	5,0 mm	5,9 mm	6,9 mm	9,0 mm	9,0 mm
REF	4000	4010	4020	4030	4040
Matériau	Zircone				

Les Prep-Caps permettent de corriger les divergences d'insertion et d'élargir la couronne clinique. Pour ce faire, le Prep-Cap est scellé sur l'implant ou le pilier Champions (R)Evolution®. Un ciment verre ionomère ou une colle duale est recommandé (RelyX Unicem, Ketac Cem [3M Espe], ou un matériau dur semblable).

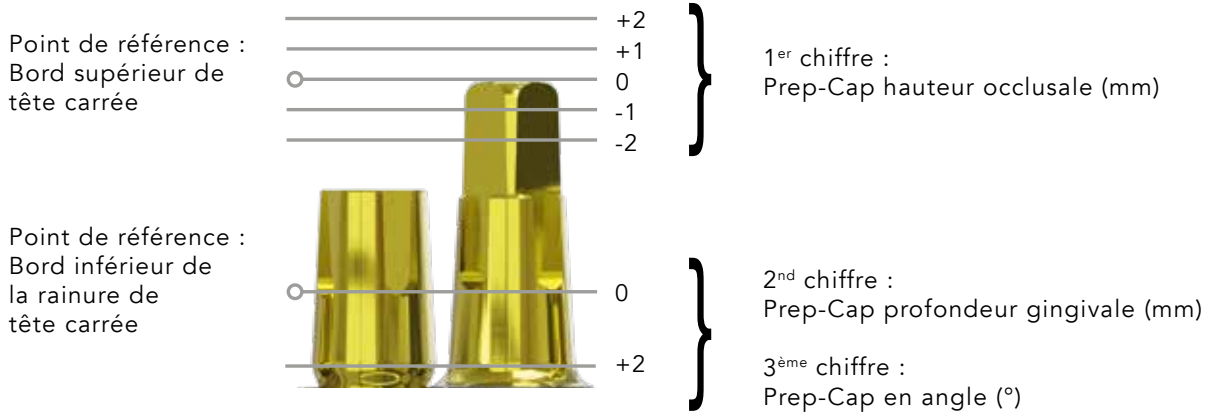

-2/+2 (0°) -2/+2 (10°) +1/0 (5°) +2/+2 (0°) +2/+2 (10°)

Diamètre	5,4 mm	5,4 mm	5,4 mm	5,4 mm	5,4 mm
Hauteur	5,0 mm	5,9 mm	6,9 mm	9,0 mm	9,0 mm
REF	4050	4060	4070	4080	4090
Matériau	Titane grade 5				

Prep-Caps sans col élargi

Les Prep-Caps sans col élargi permettent de corriger les divergences d'insertion, ils peuvent s'utiliser facultativement sur les implants Champions monoblocs à tête carrée (Classic et New-Art) ainsi que sur l'implant Champions (R)Evolution en combinaison avec un pilier Prep-Cap REF 3107.

Matériau : zircone

Explication de chiffres : voir diagramme (page 35)



	Pour les régions antérieures		Pour les régions postérieures		Pour les régions antérieures et postérieures		Pour les régions des molaires	
	+2/+2 (0°) F	+5/+2 (0°) F	+3/+2 (0°) S	+5/+2 (0°) S	+1/0 (5°)	+2/+2 (10°)	+3/0 (0°) M	+1/+2 (0°) M
Diamètre	4,2/4,4 mm	4,2/4,4 mm	5,0/6,0 mm	5,0/6,0 mm	5,4 mm	5,4 mm	5,8/8,8 mm	5,8/8,8 mm
Hauteur	8,0 mm	11,0 mm	9,0 mm	11,0 mm	6,9 mm	9,0 mm	8,8 mm	8,8 mm
REF	4036	4037	4038	4039	4020os	4040os	4043	4044

Piliers de cicatrisation

Gingiva-Clix

Les Gingiva-Clix permettent d'élargir le profil d'émergence. Pour ce faire, le Gingiva-Clix est clipsé sur le Gingiva-Shuttle (Ø 3,5 mm). Important : afin d'éviter que des forces de cisaillement et des micromouvements latéraux s'exercent sur l'implant, le Gingiva-Shuttle (y compris le Gingiva-Clix) devra émerger de façon moindres de la muqueuse. **IMPORTANT** : Avant l'insertion du Gingiva-Clix, assurez-vous que la rainure à la base du Shuttle (servant à la fixation) soit accessible. Si besoin évaser la zone pour faciliter l'insertion.

Indication de la hauteur à partir de la plateforme de l'implant

Matériau : Peek Classix (polyétherétherkétone : plastique à haute performance, sans engendrer d'allergie)



	+1/+1 élargit le diamètre du Shuttle de 2 mm et prolonge la hauteur d'environ 0,6 mm	+1/+3 élargit le diamètre du Shuttle de 2 mm et prolonge la hauteur d'environ 1,9 mm	+1/+5 élargit le diamètre du Shuttle de 2 mm et prolonge la hauteur d'environ 3,9 mm	+2/+1 élargit le diamètre du Shuttle de 4 mm et prolonge la hauteur d'environ 0,6 mm	+2/+3 élargit le diamètre du Shuttle de 4 mm et prolonge la hauteur d'environ 1,9 mm	+2/+5 élargit le diamètre du Shuttle de 4 mm et prolonge la hauteur d'environ 3,9 mm
Diamètre	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm
Hauteur	4,4 mm	5,4 mm	7,4 mm	4,4 mm	5,4 mm	7,4 mm
REF	31001	31003	31005	31011	31013	31015



Provi-Clix

Le Provi-Clix, qui est clipsé sur le Gingiva-Shuttle, peut être facilement connecté avec la prothèse provisoire dans le cas d'une restauration immédiate d'un implant Champions (R)Evolution.

Indication de la hauteur à partir de la plateforme de l'implant

Matériau : Peek Classix (polyétherétherkétone : plastique à haute performance, sans engendrer d'allergie)



Provi-Clix 0°

Provi-Clix 15°

Diamètre

5,8 mm

5,8 mm

Hauteur

11,2 mm

12,0 mm

REF







3100P

3100PO



Profil d'émergence & piliers de cicatrisation «Quasi-Georgi»

Les piliers de cicatrisation «Quasi-Georgi» permettent d'élargir le profil d'émergence. Pour ce faire, le Shuttle est retiré, et le pilier de cicatrisation est mis en place dans l'implant à l'aide du tournevis de prothèse (REF 30861/3086). Important : afin d'éviter que des forces de cisaillement et des micromouvements latéraux s'exercent sur l'implant, le «Quasi-Georgi» est utilisé seulement après la cicatrisation des implants.

						
	+1/+1	+1/+3	+1/+5	+2/+1	+2/+3	+2/+5
Diamètre	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm
Hauteur	4,0 mm	5,5 mm	7,5 mm	4,0 mm	5,5 mm	7,5 mm
REF	3100G01	3100G03	3100G05	3100G06	3100G08	3100G10

Le Quasi-Georgi est préconisé par le dentiste Dr. Georgi Aleksandrov et le Dr. Gerhard Quasigroch, superviseur du CIPC (Curriculum).



Piliers standards


Les piliers standards, droits et angulés de 15°, 22,5°, et 30°, sont disponibles en Hauteurs Gingivales (GH) de 1 mm à 5 mm.

GH = Hauteur Gingivale, A = pilier

Torque maximum : 30 Ncm

Matériau : titane grade 5

La vis de fixation correspondante (REF 3085) doit être commandée séparément.

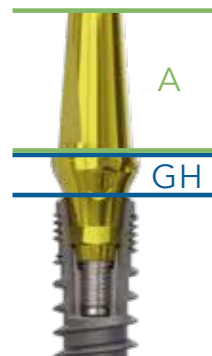

 <p>Base de collage GH1 Ø 4,0 mm GH 1,0 mm A 4,7 mm</p> <p>3104</p>	 <p>Base de collage L GH1 Ø 4,0 mm GH 1,0 mm A 6,7 mm</p> <p>31043</p>	 <p>Base de collage GH2 Ø 4,0 mm GH 2,0 mm A 4,7 mm</p> <p>31044</p>
 <p>Base de collage GH3 Ø 4,0 mm GH 3,0 mm A 4,7 mm</p> <p>31045</p>	 <p>Pilier Prep-Cap Ø 3,3 mm GH 1,0 mm A 4,1 mm</p> <p>3107</p>	

<p>0°</p>	 <p>0° GH1 Ø 4,3 mm GH 1,0 mm A 7,0 mm</p> <p>3105</p>	 <p>0° GH2 Ø 4,3 mm GH 2,0 mm A 7,0 mm</p> <p>3105.2</p>
	 <p>0° GH3 Ø 4,3 mm GH 3,0 mm A 7,0 mm</p> <p>31050</p>	 <p>0° GH4 Ø 4,3 mm GH 4,0 mm A 7,0 mm</p> <p>310504</p>

15°



15° GH1
Ø 4,3 mm
GH 1,0 mm
A 7,6 mm

31051F1



15° GH2
Ø 4,3 mm
GH 2,0 mm
A 7,6 mm

31051F2



15° GH3
Ø 4,3 mm
GH 3,0 mm
A 7,6 mm

31051F3



15° GH4
Ø 4,3 mm
GH 4,0 mm
A 7,6 mm

31051F4



15° GH5
Ø 4,3 mm
GH 5,0 mm
A 7,6 mm

31051F5

22,5°



22,5° GH1
Ø 4,3 mm
GH 1,0 mm
A 7,6 mm

31052F1



22,5° GH2
Ø 4,3 mm
GH 2,0 mm
A 7,6 mm

31052F2



22,5° GH3
Ø 4,3 mm
GH 3,0 mm
A 7,6 mm

31052F3



22,5° GH4
Ø 4,3 mm
GH 4,0 mm
A 7,6 mm

31052F4



22,5° GH5
Ø 4,3 mm
GH 5,0 mm
A 7,6 mm

31052F5

30°



30° GH1
Ø 4,3 mm
GH 1,0 mm
A 7,6 mm

31053F1



30° GH2
Ø 4,3 mm
GH 2,0 mm
A 7,6 mm

31053F2



30° GH3
Ø 4,3 mm
GH 3,0 mm
A 7,6 mm

31053F3



30° GH4
Ø 4,3 mm
GH 4,0 mm
A 7,6 mm

31053F4



30° GH5
Ø 4,3 mm
GH 5,0 mm
A 7,6 mm

31053F5

Piliers massifs préparables (Hexadapter)


Les piliers massifs préparables, qui peuvent être taillés, sont disponibles en versions droites et angulées de 15° et en Hauteurs Gingivales (GH) de 2 mm, 4 mm, et 6 mm.









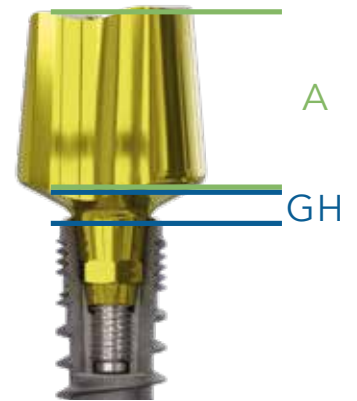

GH = Hauteur Gingivale, A = pilier

Torque maximum : 30 Ncm

Matériau : titane grade 5

Vissez ce pilier avec la vis de fixation (REF 3085) ;
cette vis de fixation doit être commandée séparément.



0°	 <p>1 GH2 Ø 6,0 mm GH 2 mm A 6 mm</p> <p>31171</p>	 <p>1L GH2 Ø 6,0 mm GH 2 mm A 11 mm</p> <p>31172</p>	
	 <p>2 GH4 Ø 6,0 mm GH 4 mm A 4 mm</p> <p>31173</p>	 <p>2L GH4 Ø 6,0 mm GH 4 mm A 9 mm</p> <p>31174</p>	 <p>3L GH6 Ø 6,0 mm GH 6 mm A 7 mm</p> <p>31175</p>
	 <p>4 GH2 Ø 5,0/7,0 mm GH 2 mm A 6 mm</p> <p>31176</p>	 <p>4 GH4 Ø 5,0/7,0 mm GH 4 mm A 9 mm</p> <p>31177</p>	
15°	 <p>1 GH2 15° Ø 6,0 mm GH 2 mm A 6 mm</p> <p>31171A</p>	 <p>1L GH2 15° Ø 6,0 mm GH 2 mm A 11 mm</p> <p>31172A</p>	
	 <p>2 GH4 15° Ø 6,0 mm GH 4 mm A 4 mm</p> <p>31173A</p>	 <p>2L GH4 15° Ø 6,0 mm GH 4 mm A 9 mm</p> <p>31174A</p>	 <p>3L GH6 15° Ø 6,0 mm GH 6 mm A 7 mm</p> <p>31175A</p>

Piliers massifs préparables (avec filetage)


Les piliers massifs préparables sont disponibles en Hauteurs Gingivales (GH) de 2 mm, 4 mm, et 6 mm, avec ou sans col élargi. Ils permettent d'être taillés.

Après la réalisation de l'empreinte, ne plus desserrer les piliers.
Pour la préparation dans le site.

GH = Hauteur Gingivale, A = pilier

Torque maximum : 30 Ncm

Matériau : titane grade 5

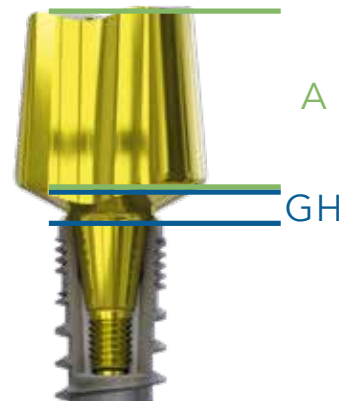

Ces piliers ne nécessitent pas de vis et se fixent avec un tournevis de prothèse (REF 3086 ou REF 30861).

<p>0° sans col élargi</p>	 <p>1 GH2 Ø 6,0 mm GH 2 mm A 6 mm 31171B</p>	 <p>1L GH2 Ø 6,0 mm GH 2 mm A 11 mm 31172B</p>
	 <p>2 GH4 Ø 6,0 mm GH 4 mm A 4 mm 31173B</p>	 <p>2L GH4 Ø 6,0 mm GH 4 mm A 9 mm 31174B</p>

<p>0° avec col élargi</p>	 <p>1 GH2 Ø 6,0 mm GH 2 mm A 6 mm 31171S</p>	 <p>1L GH2 Ø 6,0 mm GH 2 mm A 9 mm 31172S</p>
	 <p>2 GH4 Ø 6,0 mm GH 4 mm A 4 mm 31173S</p>	 <p>2L GH4 Ø 6,0 mm GH 4 mm A 9 mm 31174S</p>

Piliers Tête boule

Piliers prêts disponibles en Hauteurs Gingivales (GH) de 1 mm à 5 mm.

GH = Hauteur Gingivale, A = pilier


Torque maximum : 30 Ncm

Matériau : titane grade 5


Le pilier Tête boule est inséré avec REF 3040 ou 3060 (porte-implant). Une vis de fixation n'est pas nécessaire.




 <p>Tête boule GH1 Ø 2,9 mm GH 1 mm A 4 mm</p> <p>3106</p>	 <p>Tête boule GH3 Ø 2,9 mm GH 3 mm A 4 mm</p> <p>31060</p>	 <p>Tête boule GH5 Ø 2,9 mm GH 5 mm A 4 mm</p> <p>31061</p>
--	---	---

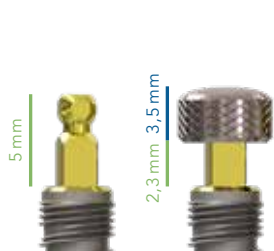

Hauteur totale + hauteur de l'attachement
Tête boule GH1

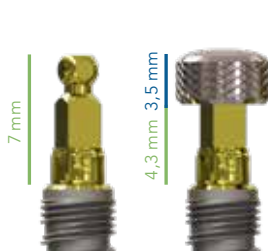

Hauteur totale + hauteur de l'attachement
Tête boule GH3

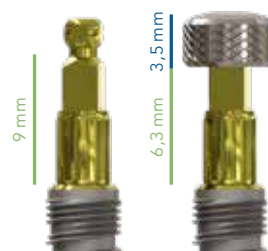

Hauteur totale + hauteur de l'attachement
Tête boule GH5

Piliers Preform

 <p>Pilier Preform ME-S pour CAD/CAM La connexion est compatible avec la base MEDENTiKA® Ø 11,5 mm</p> <p>31072</p>	 <p>Pilier Preform ME-L pour CAD/CAM La connexion est compatible avec la base MEDENTiKA® Ø 16,0 mm</p> <p>31073</p>
--	--

Les bibliothèques numériques exocad et 3shape peuvent être téléchargées sur notre site web.

Piliers CEREC

Le pilier Champions CEREC assure le flux de travail numérique habituel de CEREC et permet de fabriquer des piliers individuels au fauteuil.

Le C-Pilier pour scan CEREC sert de scanbody lors du scannage intra-oral et extra-oral.

La C-Base de collage CEREC et le C-Pilier pour scan CEREC sont dotés en coronal de la géométrie CEREC Ti-Base L, et en apical on retrouve la géométrie de connexion du Champions (R)Evolution. La C-Base de collage CEREC peut être utilisée alors qu'elle n'est pas dans la liste de la bibliothèque CEREC. Voir l'ensemble des données NANP NB A 4.5L pour l'intégration complète.

L'implant Champions (R)Evolution est vissé soit avec la C-Base de collage CEREC soit avec le C-Pilier pour scan CEREC. Pour scanner, il est nécessaire d'ajouter sur la base de collage une conception numérique de type L disponible chez Sirona-CEREC. Après la réalisation du scan, la conception numérique peut être réalisée.

Le C-Base de collage CEREC est disponible en Hauteurs Gingivales (GH) 1 mm et de 5 mm.

GH = Hauteur Gingivale, A= pilier

Torque maximum : 30 Ncm

Matériau : titane grade 5

La vis de fixation correspondante (REF 3085) doit être commandée séparément.

L'ensemble des données: NANP NB A4.5L



 <p>C-Base de collage CEREC L-Block GH1 Ø 4,5 mm GH 1 mm A 4,65 mm</p> <p>31041</p>	 <p>C-Base de collage CEREC L-Block GH2 Ø 4,5 mm GH 2 mm A 4,65 mm</p> <p>310412</p>	 <p>C-Base de collage CEREC L-Block GH3 Ø 4,5 mm GH 3 mm A 4,65 mm</p> <p>310421</p>
 <p>C-Base de collage CEREC L-Block GH4 Ø 4,5 mm GH 4 mm A 4,65 mm</p> <p>310422</p>	 <p>C-Base de collage CEREC L-Block GH5 Ø 4,5 mm GH 5 mm A 4,65 mm</p> <p>310423</p>	 <p>C-Pilier pour scan CEREC L-Block Ø 4,5 mm GH 5,5 mm A 4,65 mm</p> <p>31232</p>

ICA-Piliers et -Caps

ICA-Piliers


Le ICA-Pilier est utilisé pour fabriquer un pilier hybride personnalisé. La base de collage en titane est dotée de rainures longitudinales de telle sorte que l'ICA-Cap en zircone puisse être aligné en fonction de la position de la dent sur le modèle. Après le marquage du niveau gingival, la correction du pilier peut être réalisée avec une turbine hydraulique, et le pilier-hybride peut être collé.

Indication de la Hauteur Gingivale à partir de la plateforme de l'implant

Torque maximum : 30 Ncm

Matériau : titane grade 5

La vis de fixation correspondante (REF 3085) doit être commandée séparément. Les ICA-Piliers sont disponibles dans les bibliothèques Champions de 3shape et d'exocad et peuvent être téléchargés sur le site web Champions.

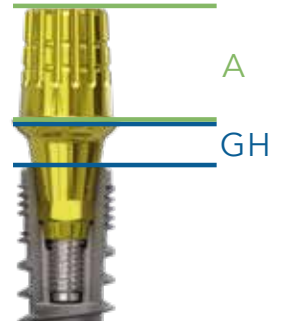

 <p>ICA-Pilier GH1 Base de collage Ø 4,6 mm GH 1 mm A 4,7 mm</p> <p>3102</p>	 <p>ICA-Pilier GH2 Base de collage Ø 4,6 mm GH 2 mm A 4,7 mm</p> <p>31021</p>
 <p>ICA-Pilier GH3 Base de collage Ø 4,6 mm GH 3 mm A 4,7 mm</p> <p>31020</p>	 <p>Aide au collage 5 pièces/pack, ø 2,1 mm, Hauteur : 20 mm, Matériau : plastique</p> <p>7000</p>



ICA-Caps

Permet la fabrication d'un pilier hybride personnalisé avec le ICA-Pilier en titane.

Les ICA-Caps sont disponibles en Hauteurs Gingivales (GH) de 1 mm, 3 mm, et 5 mm ainsi qu'en versions droites et angulées de 15° et 22°.

Matériau : zircone



Pour les régions antérieures

	0° GH1 F	0° GH3 F	15° GH3 F	15° GH3 FL	15° GH5 F	22° GH3 F	22° GH3 FL
Diamètre	5,0/6,0 mm	5,0/6,0 mm	5,0/6,0 mm	6,0/7,0 mm	5,0/6,0 mm	5,0/6,0 mm	6,0/7,0 mm
Hauteur	9,0 mm	11,0 mm	11,0 mm	11,0 mm	11,0 mm	11,0 mm	11,0 mm
REF	7001F	7003F	7153F	7153FL	7155F	7223F	7223FL



Pour les régions postérieures

	0° Télescope	0° GH1 S	0° GH1-M Molaire	0° GH1-P Prémolaire	0° GH3 S	0° GH5 S	15° GH3 S	15° GH3 SL	15° GH5 S
Diamètre	6,5/7,5 mm	6,0/7,0 mm	6,0/7,0 mm	6,0 mm	6,0/7,0 mm	6,0/7,0 mm	6,0/7,0 mm	7,0/8,0 mm	6,0/7,0 mm
Hauteur	11,0 mm	9,0 mm	7,0 mm	7,0 mm	11,0 mm	11,0 mm	11,0 mm	11,0 mm	11,0 mm
REF	7005TK	7001S	7001M	7001P	7003S	7005S	7153S	7153SL	7155S

ICA-Boîte d'échantillons

incl. 14 échantillons ICA-Caps pour régions antérieures et postérieures. À partir de ces échantillons, le prothésiste peut sélectionner l'ICA-Cap approprié pour son modèle.

Matériau de la boîte : plastique

Livraison sans ICA-Pilier.

REF: 7001



Multi-Unit

Le système de pilier Multi-Unit a été conçu pour une polyvalence optimale, et pour optimiser l'esthétique des prothèses à unités multiples, qui peuvent être vissées et également pour des prothèses complètes. Les piliers, d'une hauteur verticale réduite, sont disponibles en piliers droits et en angles de 17° et 30° et en Hauteurs Gingivales (GH) de 1 mm jusqu'à 5 mm.

GH = Hauteur Gingivale, A = pilier


Torque maximum : 30 Ncm

Matériau : titane grade 5

Les vis de fixation (REF 3085) et les vis de Multi-Unit (REF 3085M) correspondantes doivent être commandées séparément.

Pour REF 3108/31082/30183/31084/31085, seule la vis de Multi-Unit 3085M doit être commandée.

Les systèmes Multi-Unit sont disponibles dans les bibliothèques Champions de 3shape et d'exocad et peuvent être téléchargés sur le site web Champions.

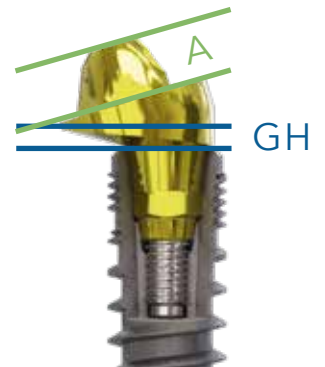

0°	 0° GH1 avec vis de fixation Ø 5,2 mm GH 1 mm A 2 mm 3108	 0° GH2 avec vis de fixation Ø 5,2 mm GH 2 mm A 2 mm 31082
	 0° GH3 avec vis de fixation Ø 5,2 mm GH 3 mm A 2 mm 31083	 0° GH4 avec vis de fixation Ø 5,2 mm GH 4 mm A 2 mm 31084

Ces piliers sont insérés avec l'instrument de vissage Multi-Unit REF 3062.



17°

	 <p>17° GH1 Ø 5,2 mm GH 1 mm A 2 mm</p> <p>3109</p>	 <p>17° GH2 Ø 5,2 mm GH 2 mm A 2 mm</p> <p>31092</p>
 <p>17° GH3 Ø 5,2 mm GH 3 mm A 2 mm</p> <p>31093</p>	 <p>17° GH4 Ø 5,2 mm GH 4 mm A 2 mm</p> <p>31094</p>	 <p>17° GH5 Ø 5,2 mm GH 5 mm A 2 mm</p> <p>31095</p>

30°

	 <p>30° GH1 Ø 5,2 mm GH 1 mm A 2 mm</p> <p>3110</p>	 <p>30° GH2 Ø 5,2 mm GH 2 mm A 2 mm</p> <p>31102</p>
 <p>30° GH3 Ø 5,2 mm GH 3 mm A 2 mm</p> <p>31103</p>	 <p>30° GH4 Ø 5,2 mm GH 4 mm A 2 mm</p> <p>31104</p>	 <p>30° GH5 Ø 5,2 mm GH 5 mm A 2 mm</p> <p>31105</p>

Accessoires Multi-Unit



Multi-Unit LOC®

Chape de protection/outil «ArPeRol» pour empreinte Multi-Unit à ciel fermé

Vis de Multi-Unit (pour fixer Cap/LOC/chape de protection)

Outil de positionnement

Instrument de vissage Multi-Unit

Diamètre	5,2 mm	5,2 mm	–	–	4,9 mm
Hauteur	5,0 mm	6,2 mm	–	–	13,0 mm
REF	3113	31106	3085M	31140	3062

Multi-Unit Cap

Anti-rotationnels et rotationnels

Matériau : titane ou POM (calcinable)



Rotationnel

Anti-rotationnel

	Titane	Titane incl. vis	POM	POM incl. vis	Titane	Titane incl. vis
Diamètre	5,2 mm	5,2 mm	5,2 mm	5,2 mm	5,2 mm	5,2 mm
Hauteur	12,9 mm	12,9 mm	12,9 mm	12,9 mm	12,9 mm	12,9 mm
REF	3111	31110	3112	31120	3111R	3111R1





LOC Locator

Ils permettent de fixer une prothèse amovible mais également de corriger les divergences : (sans pilier MU) 15° et 30° entre 2 implants Champions (R)Evolution réhabilités avec les LOCs. Indication de la hauteur à partir de la plateforme de l'implant



Court GH3*1



Long GH5*1



Multi-Unit LOC*2



Diamètre	3,9 mm	3,9 mm	5,2 mm
Hauteur	4,3 mm	6,3 mm	5,0 mm
REF	3143	3144	3113

*1 Vissé avec vis de fixation 3085
Torque maximum : 30 Ncm

*2 Vissé avec vis de Multi-Unit 3085M
Torque maximum : 30 Ncm

Docklocs

Permettent la fixation des prothèses complètes sur Locators.



Docklocs gris

HPP Insert de rétention aucune rétention pour la restauration et la protection à long-terme Temporairement ne pas utiliser dans l'ancrage avec les piliers inclus (8 pièces)

A0001.S



Docklocs rouge

HPP Insert de rétention élargi, rétention légère (environ 600 g/6 N) (8 pièces)

A0005.S



Docklocs orange

HPP Insert de rétention élargi, rétention moyenne (environ 1000 g/ 10 N) (8 pièces)

A0006.S



Docklocs vert

HPP Insert de rétention élargi, rétention forte (environ 1900 g / 19 N) (8 pièces)

A0007.S



Instrument universel Bibloc

A0019



HPP Kit de laboratoire

Correction de divergences jusqu'à 40°
2 x Boîtier de rétention (Ø 5,5 mm, hauteur 2,5 mm) avec insert de processus noir (hauteur 1,9 mm)
2 x Rondelle de blocage
2 x Insert de rétention, vert
2 x Insert de rétention, orange
2 x Insert de rétention, rouge

A0051.S.T.

Attachements

Permettent de fixer les prothèses complètes sur les piliers à tête boule.



**MMT roux
incl. joint torique
roux**
Matériau :
acier inoxydable

**MMT bleu
incl. joint torique
bleu**
Matériau :
acier inoxydable

**Joint torique MMT
noir : rétention forte**
4 pièces/pack
Matériau : silicone

**Joint torique MMT
roux : rétention
normale**
4 pièces/pack
Matériau : silicone

**Joint torique MMT
bleu : rétention
faible**
4 pièces/pack
Matériau : silicone

Diamètre	5,1 mm	5,1 mm	–	–	–
Hauteur	2,6 mm	2,6 mm	–	–	–
REF	3130	31301	3150	3160	3170



Équipement de laboratoire et empreinte



Transfert d'empreinte clipsé et scanbody Peek
Produit à usage unique, hauteur à partir du Gingiva-Shuttle
Matériau : Peek

Transfert d'empreinte clipsé Peek court
J Peek Transfer (Dr. Jérôme Unger)
Produit à usage unique, hauteur à partir du Gingiva-Shuttle
Matériau : Peek

Transfert d'empreinte titane
Hauteur à partir du Gingiva-Shuttle
Matériau : titane grade 5

Vis de transfert d'empreinte
Matériau : titane grade 5

Transfert d'empreinte à ciel ouvert (bleu)
Indication de la hauteur à partir de la plateforme de l'implant
Matériau : titane grade 5

Vis de transfert d'empreinte à ciel ouvert (bleue)
Matériau : titane grade 5

Diamètre

4,4 mm

4,4 mm

3,0 mm

–

3,6 mm

–

Hauteur

8,2 mm

4,6 mm

7,0 mm

–

10,0 mm

–

REF

3122

3122K

31220

30850

31224

30858



Chape d'empreinte pour transfert d'empreinte titane
Produit à usage unique
Matériau : Peek

Kit de transferts d'empreinte titane
Transfert d'empreinte titane, chape d'empreinte, et vis longue;
torque maximum : 5 Ncm

Kit de transferts d'empreinte à ciel ouvert (bleu)
Transfert et vis d'empreinte à ciel ouvert

Pilier pour scan
Vissé directement sur l'analogue de laboratoire
Matériau : titane grade 4

Analogue de laboratoire, sans vis de fixation
Matériau : titane grade 5

Vis de fixation
Matériau : titane grade 5

Diamètre

5,5 mm

–

–

–

–

–

Hauteur

4,7 mm

–

–

–

–

–

REF

3116

31221

31225

31230

31210

3085



Gingiva-Shuttle
Indication de la hauteur à partir de la plateforme d'implant
Matériau : titane grade 5

Laboratoire Shuttle
Indication de la hauteur à partir de la plateforme d'implant
Matériau : titane grade 5

Analogue de laboratoire
incl. vis de fixation également pour la fabrication de modèle numérique. Bibliothèque CAD/ CAM sur notre site web
Matériau : titane grade 5

Kit d'analogues de laboratoire
Analogue de laboratoire, vis de fixation, et laboratoire Shuttle
Matériau : Titane grade 5










Diamètre	3,6 mm	3,6 mm	–	–
Hauteur	3,5 mm	3,5 mm	–	–
REF	3100	3100L	3121	31218





Piliers d'essai pour laboratoire

À destination des prothésistes dont l'objectif est de les aider dans le choix de l'angle et de la Hauteur Gingivale du pilier définitif.

 <p>15° GH2-1 31141</p>	 <p>15° GH3 31142</p>	 <p>15° GH5-4 31143</p>
 <p>22,5° GH2-1 31144</p>	 <p>22,5° GH3 31145</p>	 <p>22,5° GH5-4 31146</p>
 <p>30° GH2-1 31147</p>	 <p>30° GH3 31148</p>	 <p>30° GH5-4 31149</p>
 <p>Outil de positionnement 31140</p>	<p>Kit de piliers d'essai pour laboratoire comprenant 9 piliers d'essai pour laboratoire et l'outil de positionnement. Matériau de la boîte : plastique</p> <p>31145</p> 	

Mult-Unit



Analogue de laboratoire Multi-Unit



Transfert d'empreinte Multi-Unit

Livraison sans vis de fixation



Vis de transfert d'empreinte Multi-Unit

Pour transfert d'empreinte
Torque maximum : 5 Ncm



Kit de transferts d'empreinte Multi-Unit

Transfert d'empreinte Multi-Unit incl. vis de transfert d'empreinte Multi-Unit



Pilier pour scan Multi-Unit

Vissé directement sur le pilier Multi-Unit
Matériau : titane grade 4

Diamètre

– 4,9 mm 5,2 mm – –

Hauteur

– 13,0 mm 8,0 mm – –

REF

3114 31222 30852 31223 31231



DIM-Analogue Multi-Unit
(Digital Implant Model Analog [analogue Multi-Unit de modèle imprimé 3D])
Analogue d'implant pour la conception numérique de modèles. Bibliothèque CAD/CAM sur notre site web
Matériau : acier inoxydable/ titane grade 5



Aide au collage
5 pièces/pack
Matériau : plastique



Support pour pilier
Support analogue long pour l'aide au fraisage extra-oral des piliers
Matériau : titane grade 5

Diamètre


– 2,1 mm –

Hauteur

– 20,0 mm –

REF

31131 7000 3119

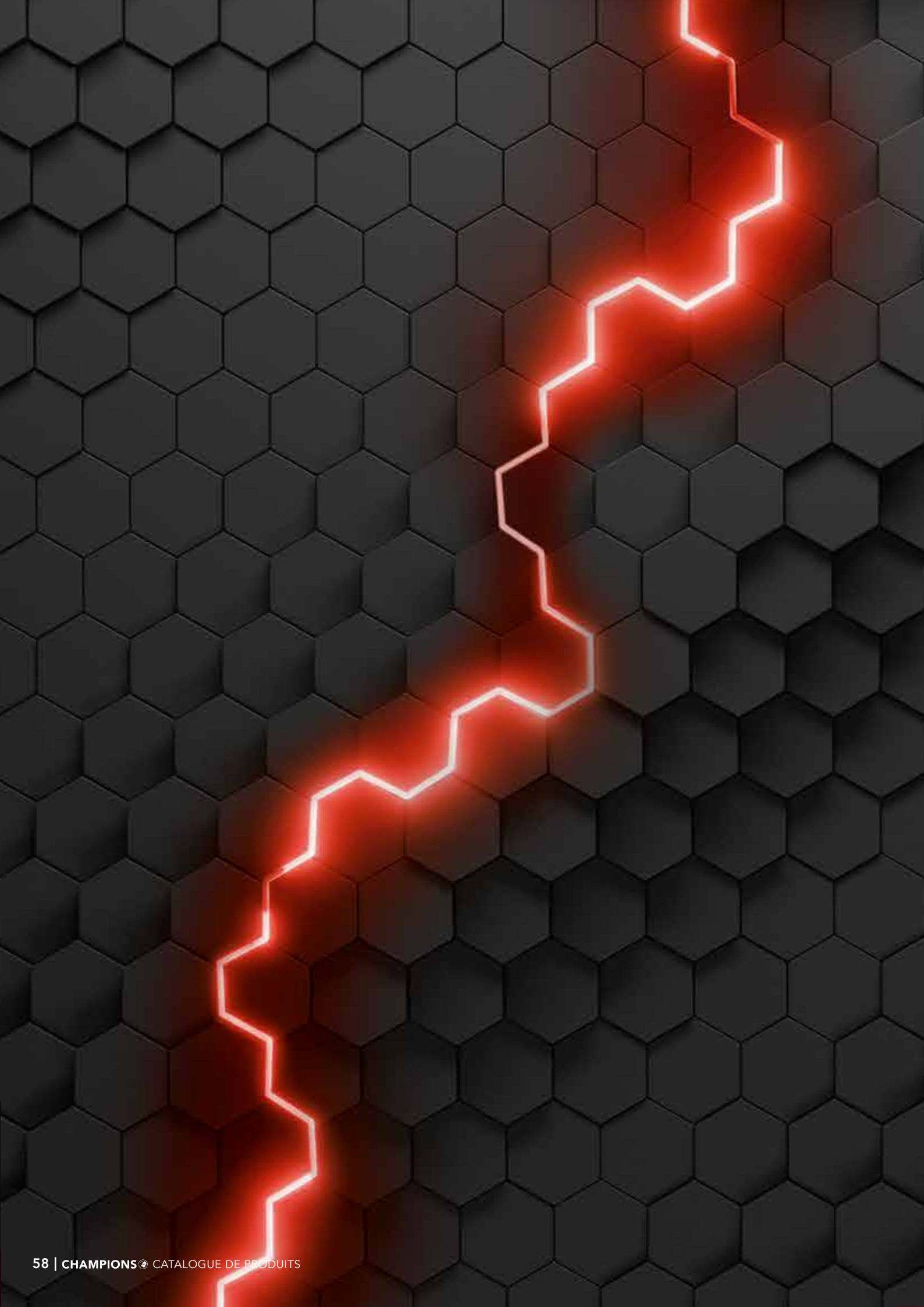

CHAMPIONS TÊTE CARRÉE

- Chirurgie & Prothèse -



Champions Tête carrée

Pareillement aux implants Champions (R)Evolution®, les implants monoblocs Champions se composent de titane grade 4. Ils possèdent la même surface rugueuse et propre. Les implants monoblocs permettent la réhabilitation de grandes unités en régions antérieures et postérieures. Ils peuvent également être posés en zones esthétiques.



Tête carrée Classic

Implant monobloc conique en forme de vis qui peut être posé dans l'os mandibulaire D1

Matériau : titane grade 4

Diamètre	Longueur	Hauteur	REF
3,5 mm	8,0 mm	8,1 mm	1005
	10,0 mm	8,1 mm	1025
	12,0 mm	8,1 mm	1055
	14,0 mm	8,1 mm	1095
	16,0 mm	8,1 mm	1135



Tête carrée New Art

Implant monobloc, « cylindro-conique », en forme de vis, qui peut être posé dans l'os maxillaire et mandibulaire (D1–D4).

Matériau : titane grade 4



Diamètre	Longueur	Hauteur	REF
3,0 mm	10,0 mm	8,0 mm	1015
	12,0 mm	8,0 mm	1040
	14,0 mm	8,0 mm	1080
	16,0 mm	8,0 mm	1120
3,5 mm	6,0 mm	8,1 mm	0900
	8,0 mm	8,1 mm	1000
	10,0 mm	8,1 mm	1020
	12,0 mm	8,1 mm	1050
	14,0 mm	8,1 mm	1090
	16,0 mm	8,1 mm	1130
4,0 mm	6,0 mm	8,25 mm	0902
	8,0 mm	8,25 mm	1007
	10,0 mm	8,25 mm	1027
	12,0 mm	8,25 mm	1057
	14,0 mm	8,25 mm	1097
	16,0 mm	8,25 mm	1137
4,5 mm	6,0 mm	8,6 mm	0910
	8,0 mm	8,6 mm	1010
	10,0 mm	8,6 mm	1030
	12,0 mm	8,6 mm	1060
	14,0 mm	8,6 mm	1100
5,5 mm	6,0 mm	9,2 mm	0920
	8,0 mm	9,2 mm	1012
	10,0 mm	9,2 mm	1035
	12,0 mm	9,2 mm	1070
	14,0 mm	9,2 mm	1110
	16,0 mm	9,2 mm	1150

Porte-implants


Ces porte-implants permettent la pose des implants avec connexion extérieure de Tête carrée (Tête carrée Champions et Tête boule Champions) ainsi que la fixation des piliers Tête boule Champions (R)Evolution).

Matériau : acier inoxydable



	Connexion CA pour connexion extérieure de Tête carrée : implant monobloc ou pilier Tête boule torque max. avec contre-angle sans Hex : 50 Ncm	Standard pour connexion extérieure de Tête carrée : im- plant monobloc ou pilier Tête boule	Long pour connexion extérieure de Tête carrée : im- plant monobloc ou pilier Tête boule
Diamètre	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Longueur	7,0 mm	13,0 mm	26,0 mm
REF	3039	3040	3060

Les Prep-Caps permettent de corriger les divergences d'insertion et d'élargir la couronne clinique. Pour ce faire, le Prep-Cap est scellé sur l'implant ou le pilier Champions (R)Evolution®. Un ciment verre ionomère ou une colle duale est recommandé (RelyX Unicem, Ketac Cem [3M Espe], ou un matériau semblable).

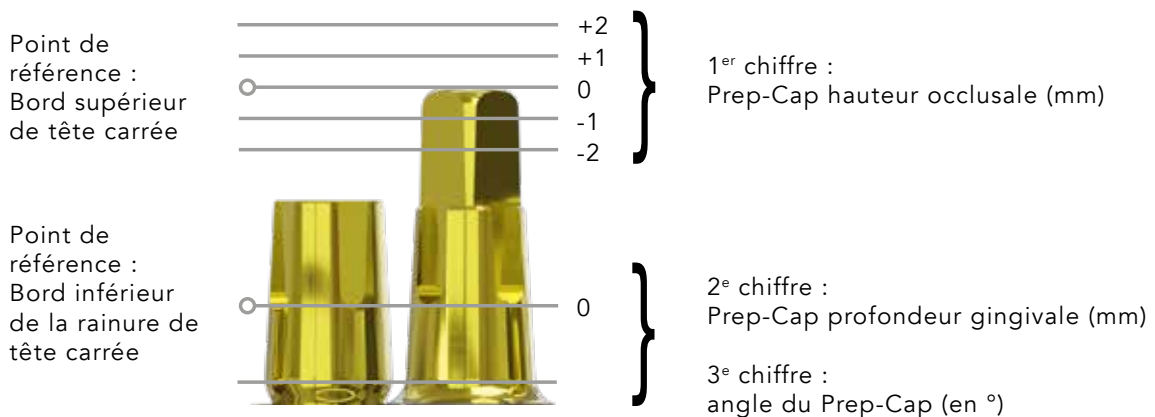

Prep-Caps

Prep-Caps avec col élargi

Les Prep-Caps permettent de corriger les divergences d'insertion, ils peuvent s'utiliser facultativement sur les implants Champions monoblocs à tête carrée (Classic et New-Art) ainsi que sur l'implant Champions (R)Evolution en combinaison avec un pilier Prep-Cap REF 3107.

Matériau : voir tableau

Explication des chiffres : voir diagramme



-2/+2 (0°)

-2/+2 (10°)

+1/0 (5°)

+2/+2 (0°)

+2/+2 (10°)

Diamètre

5,4 mm

5,4 mm

5,4 mm

5,4 mm

5,4 mm

Hauteur

5,0 mm

5,9 mm

6,9 mm

9,0 mm

9,0 mm

REF

4000

4010

4020

4030

4040

Matériau

Zircone



-2/+2 (0°)

-2/+2 (10°)

+1/0 (5°)

+2/+2 (0°)

+2/+2 (10°)

Diamètre

5,4 mm

5,4 mm

5,4 mm

5,4 mm

5,4 mm

Hauteur

5,0 mm

5,9 mm

6,9 mm

9,0 mm

9,0 mm

REF

4050

4060

4070

4080

4090

Matériau

Titane Grade 5

Prep-Caps sans col élargi

oval, conique

Les Prep-Caps permettent de corriger les divergences d'insertion, ils peuvent s'utiliser facultativement sur les implants Champions monoblocs à tête carrée (Classic et New-Art) ainsi que sur l'implant Champions (R)Evolution en combinaison avec un pilier Prep-Cap REF 3107.


Matériau : zircone

Explication de chiffres : voir diagramme



	Pour les régions antérieures		Pour les régions postérieures		Pour les régions antérieures et postérieures		Pour les régions des molaires	
	+2/+2 (0°) F	+5/+2 (0°) F	+3/+2 (0°) S	+5/+2 (0°) S	+1/0 (5°)	+2/+2 (10°)	+3/0 (0°) M	+1/+2 (0°) M
Diamètre	4,2/4,4 mm	4,2/4,4 mm	5,0/6,0 mm	5,0/6,0 mm	5,4 mm	5,4 mm	5,8/8,8 mm	5,8/8,8 mm
Hauteur	8,0 mm	11,0 mm	9,0 mm	11,0 mm	6,9 mm	9,0 mm	8,8 mm	8,8 mm
REF	4036	4037	4038	4039	4020os	4040os	4043	4044

Les Prep-Caps permettent de corriger les divergences d'insertion et d'élargir la couronne clinique. Pour ce faire, le Prep-Cap est scellé sur l'implant ou le pilier Champions (R)Evolution®. Un ciment verre ionomère ou une colle duale est recommandé (RelyX Unicem, Ketac Cem [3M Espe], ou un matériau semblable).

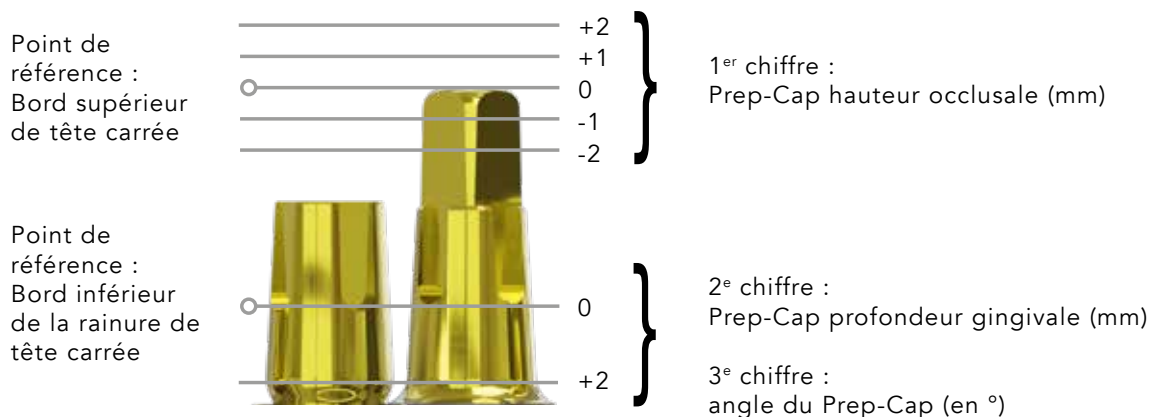

LOC Locator

Champions LOCs permettent de fixer une prothèse amovible mais également de corriger les divergences : jusqu'à 20° pour un implant unitaire, jusqu'à 40° entre plusieurs implants. Le LOC doit être scellé.



Court

Pour utiliser le LOC court, la tête carrée de l'implant doit être détachée au-dessus des rainures.

Long

Diamètre	3,9 mm	3,9 mm
Hauteur	4,0 mm	7,0 mm
REF	3141	3142

Docklocs

Permettent la fixation des prothèses complètes sur Locators.



Docklocs gris

HPP Insert de rétention aucune rétention pour la restauration et la protection à long-terme Temporairement ne pas utiliser dans l'ancrage avec les piliers inclus (8 pièces)

A0001.S



Docklocs rouge

HPP Insert de rétention élargi, rétention légère (environ 600 g/6 N) (8 pièces)

A0005.S



Docklocs orange

HPP Insert de rétention élargi, rétention moyenne (environ 1000 g/ 10 N) (8 pièces)

A0006.S



Docklocs vert

HPP Insert de rétention élargi, rétention forte (environ 1900 g / 19 N) (8 pièces)

A0007.S



Instrument universel Bibloc

A0019



HPP Kit de laboratoire

Correction de divergences jusqu'à 40°
2 x Boîtier de rétention (Ø 5,5 mm, hauteur 2,5 mm) avec insert de processus noir (hauteur 1,9 mm)
2 x Rondelle de blocage
2 x Insert de rétention, vert
2 x Insert de rétention, orange
2 x Insert de rétention, rouge

A0051.S.T.

Équipement de laboratoire et empreinte



**Analogue de laboratoire
Tête carrée**



Chape d'empreinte
(transfert d'empreinte pour l'implant mono-bloc tête carrée)
Indication : Hauteur gingivale > 3 mm
Matériau : plastique



Anneau en ligne de marge
Rondelles de préparation de marge,
20 pièces/pack
Matériau : silicone



Analogue de laboratoire LOC tête carrée
Matériau : acier inoxydable

Diamètre	-	4,5 mm	-	-
Hauteur	-	5,0 mm	-	-
REF	3120	3115	3175	3139




VIDEOS

on  YouTube

@ChampionsImplantsGmbHFlonheim



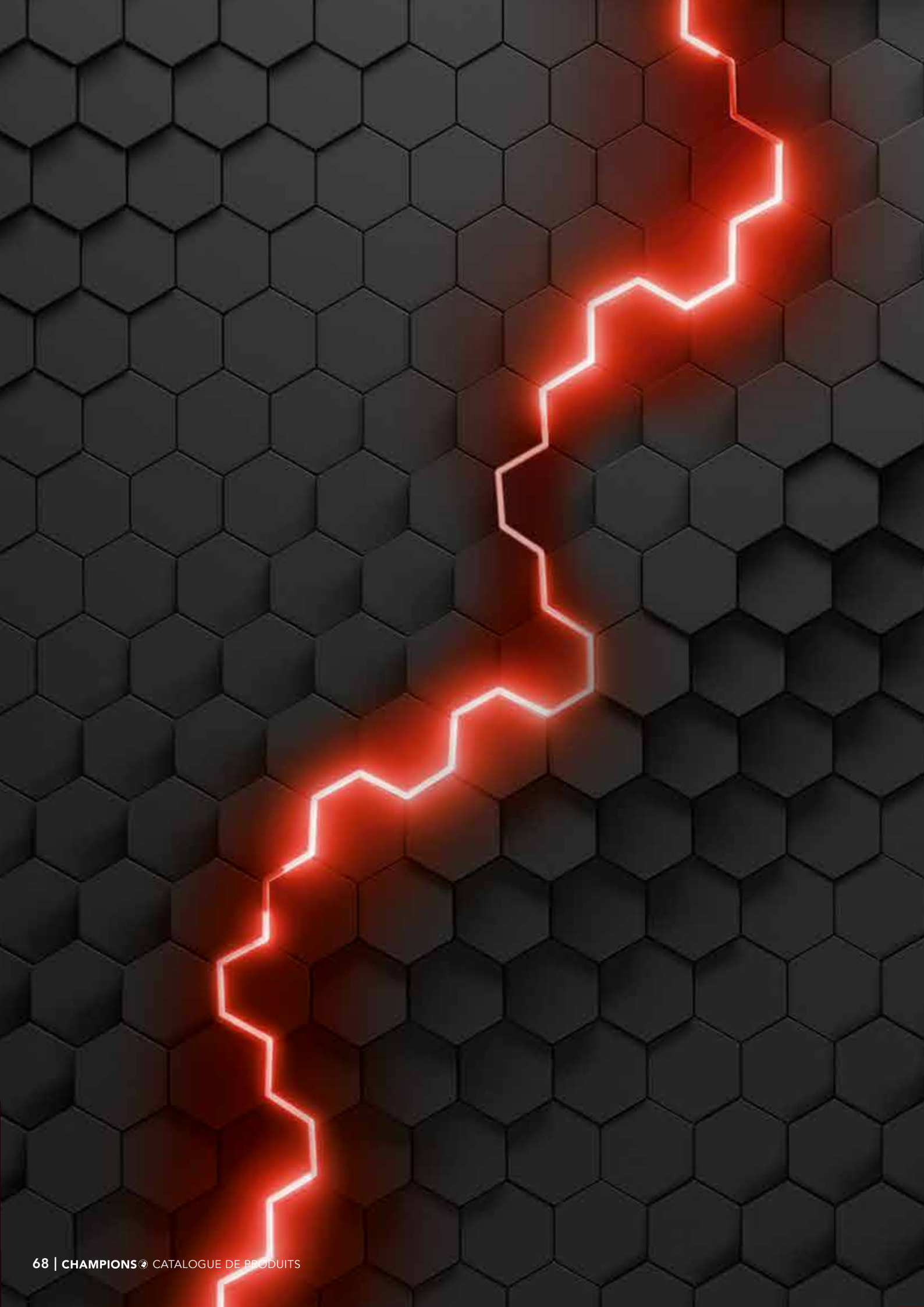

CHAMPIONS TÊTE BOULE

- Chirurgie & Prothèse -



Champions Tête boule

Implant monobloc en forme de vis qui peut être posé dans les qualités osseuses maxillaires et mandibulaires (D1–D4) pour fixer une prothèse amovible. Dans le maxillaire, nous recommandons la pose d'un minimum de 3 piliers implantaires/moignons naturels par quadrant. Dans la mandibule, nous recommandons la pose d'un minimum de 2 piliers implantaires/moignons naturels par quadrant.
Matériau : titane grade 4



Diamètre	Longueur	Hauteur	REF
2,5 mm	10,0 mm	6,3 mm	1900
	12,0 mm	6,3 mm	2015
	14,0 mm	6,3 mm	2035
	16,0 mm	6,3 mm	2055
3,0 mm	8,0 mm	6,8 mm	1890
	10,0 mm	6,8 mm	1905
	12,0 mm	6,8 mm	2016
	14,0 mm	6,8 mm	2040
	16,0 mm	6,8 mm	2060
4,0 mm	8,0 mm	7,1 mm	1895
	10,0 mm	7,1 mm	2005
	12,0 mm	7,1 mm	2025
	14,0 mm	7,1 mm	2050
	16,0 mm	7,1 mm	2070



Porte-implants

Ces porte-implants permettent la pose d'implants avec connexion extérieure de Tête carrée (Champions Tête carrée, Champions Tête boule, et les piliers Tête boule Champions (R)Evolution).

Matériau : acier inoxydable



	Connexion CA pour connexion extérieure de Tête carrée : implant monobloc ou pilier Tête boule torque max. avec contre-angle sans Hex : 50 Ncm	Standard pour connexion extérieure de Tête carrée : implant monobloc ou pilier Tête boule	Long pour connexion extérieure de Tête carrée : implant monobloc ou pilier Tête boule
Diamètre	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Longueur	7,0 mm	13,0 mm	26,0 mm
REF	3039	3040	3060

Prep-Cap

Prep-Cap ZrO2 tête boule (0°) pour l'adaptation des couronnes scellées ou collées.

Un ciment verre ionomère ou une colle duale est recommandé (RelyX Unicem, Ketac Cem [3M Espe], ou un matériau semblable).

Ø 4,5 mm, Hauteur: 5,5 mm
Matériau : zircone

REF: 4098



Rescue-Cap

Chape à tête boule (0°) à sceller en cas de fracture de la boule
Un ciment verre ionomère ou une colle duale est
recommandé (RelyX Unicem, Ketac Cem [3M Espe],
ou un matériau semblable).

Ø 3,3 mm, Hauteur : 5 mm
Matériau : titane grade 5

REF: 3118



1 → 2 → 3

Chape à tête boule (0°) à sceller
en cas de fracture de la boule (1).
D'abord, polir la partie de la tête
boule qui reste (2). Ensuite, sceller
le Rescue-Cap (3).

Attachements

Permettent de fixer les prothèses complètes sur les piliers à tête boule. Avec résilience



**MMT roux
incl. joint torique
roux**
Matériau :
acier inoxydable

**MMT bleu
incl. joint torique
bleu**
Matériau :
acier inoxydable

**Joint torique MMT
noir : rétention forte**
4 pièces/pack
Matériau : silicone

**Joint torique MMT
roux : rétention
normale**
4 pièces/pack
Matériau : silicone

**Joint torique MMT
bleu : rétention
faible**
4 pièces/pack
Matériau : silicone

Diamètre	5,1 mm	5,1 mm	–	–	–
Hauteur	2,6 mm	2,6 mm	–	–	–
REF	3130	31301	3150	3160	3170


Équipement de laboratoire et empreinte



**Analogue de
laboratoire
Tête boule**
Matériau :
acier inoxydable

**Chape
d'empreinte**
Indication :
Hauteur gingivale
> 3 mm
Matériau :
plastique

Diamètre	–	4,5 mm
Hauteur	–	5,0 mm
REF	3140	3115

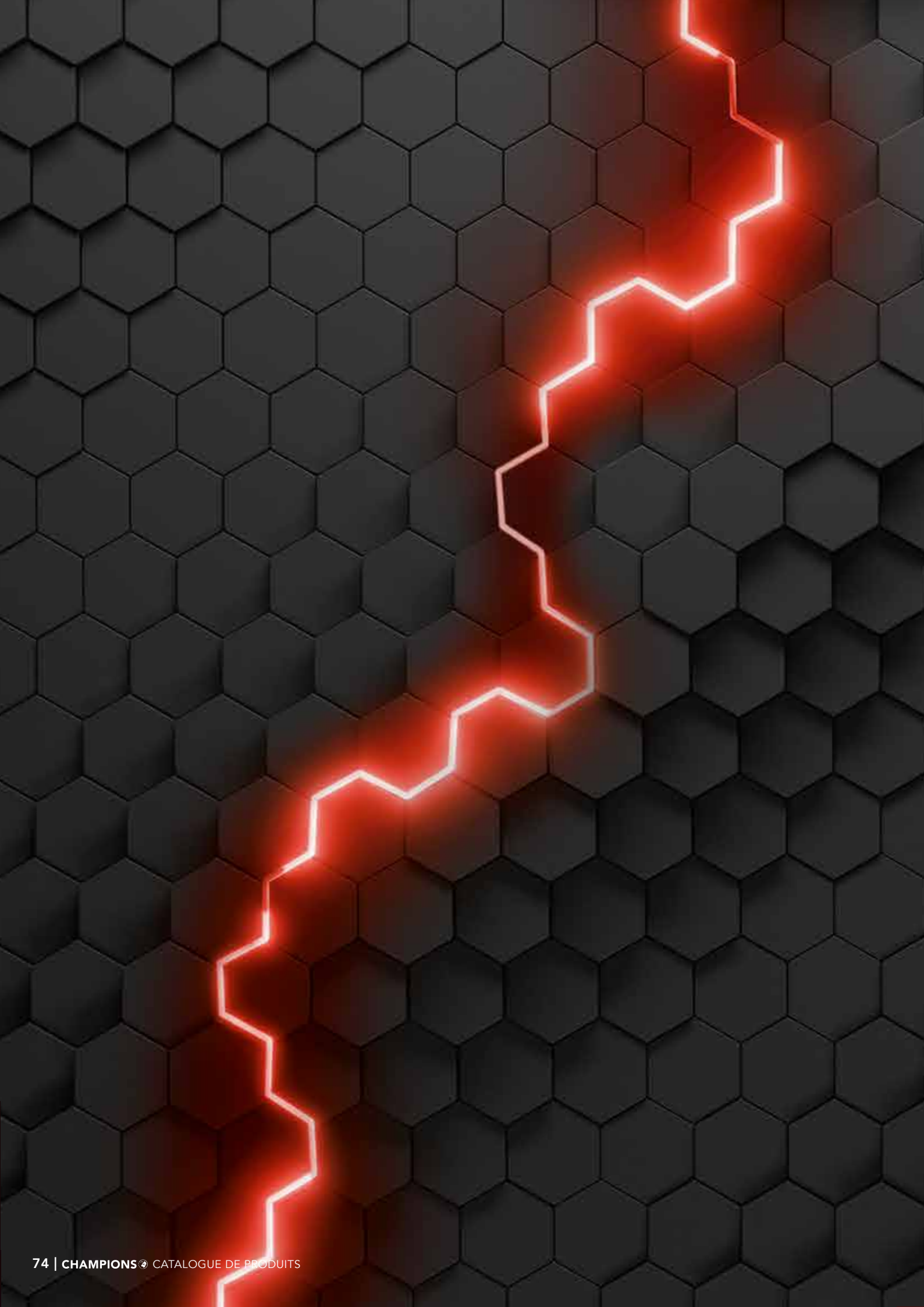


CHAMPIONS ACCESSOIRES

– Outils & Matériaux –



Outils

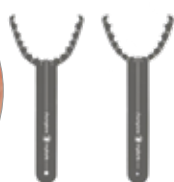

Guide implant Champions®

Outil pour positionnement des implants (selon Prof. Dr. Ali El-Hamid)
Kit: pour maxillaire et mandibule
Adaptation individuelle au patient grâce à son matériau métallique malléable, stérilisable et réutilisable

4311



Kit de modulateurs MIMI

Instrument
Bone-Spreading
(expansion osseuse)

4100



MIMI-Modulateur Maxillaire

Instrument
Bone-Spreading
(expansion osseuse)

4101



MIMI-Modulateur Mandibule

Instrument
Bone-Spreading
(expansion osseuse)

4102



Contre-angle

Coxo Contre-angle
vert 20 : 1
avec lumière intégrée

61151



D-CAM HD S - droit 0° incl. TWAIN-module

Caméra 0° incl. Software Medical EDA, avec une résolution 960 x 720 px (vidéo) ou 2592 x 1944 (images)

6113HDS



C-Sailor Pro Moteur d'implantologie

Moteur d'implantologie, équipé d'un écran tactile, d'une pédale multifonctionnelle, et d'un contre-angle (vert 20 : 1) avec une lumière LED intégrée et un rangement. Emballage dans une mallette d'aluminium de qualité

6117



VHC Starter Paket (kit de démarrage diagnostic Vitamine D)

1 x Digital Reader (lecteur numérique)
25 x Vitamine D-Test
1 x Câble de données et logiciel

CI001



VHC Vitamine D-Test

25 x VHC Vitamine D-cassettes de test et samplers (échantillonneurs)
1 x Échantillon de solution tamponnée (6 ml)
1 x Carte RFID
1 x Instructions d'utilisation

CI002



VHC Vitamine D-Reader (lecteur de vitamine D) incl. logiciel

Dispositif de mesure facile d'utilisation permettant l'analyse rapide et quantitative des vitamines D2 et D3, de qualité de laboratoire selon les exigences les plus rigoureuses.

CI003

Matériaux de régénération



Hyadent Gel d'acide hyaluronique

Le gel est un acide hyaluronique biologique, stérile, et transparent, d'origine non animale. Gel d'acide hyaluronique 2 x 1,2 ml Capsule cylindrique pour seringue à cartouche

9009



DentOss TCP

Substitut osseux purement synthétique qui se compose de phosphate tricalcique beta (β -TCP) en phase pure. En 4 à 6 mois, le tissu osseux se régénère, permettant l'implantation.

1 x 0,5 g fin (0,1–0,5 mm)	CI-D01	1 x 1,0 g fin (0,1–0,5 mm)	CI-D05
1 x 0,5 g gros (0,5–1,0 mm)	CI-D02	1 x 1,0 g gros (0,5–1,0 mm)	CI-D06
5 x 0,5 g fin (0,1–0,5 mm)	CI-D03	5 x 1,0 g fin (0,1–0,5 mm)	CI-D07
5 x 0,5 g gros (0,5–1,0 mm)	CI-D04	5 x 1,0 g gros (0,5–1,0 mm)	CI-D08



BloodSTOP iX

Naturel, d'origine non animale, biocompatible, et de haute tolérance cutanée, BloodSTOP iX est un pansement hémostatique permettant la suture adhésive résorbable, similaire à une gaze traditionnelle, qui permet d'arrêter le saignement. Selon une composition brevetée, une cellulose de coton est oxydée et éthérisée pour produire une matrice très absorbante, hydrophile, soluble dans l'eau, et biorésorbable. Lors du traitement intra-oral des plaies, BloodSTOP iX accélère l'absorption du sang et des exsudats, ainsi il se transforme en une substance gélatineuse qui comble la plaie avec une couche protectrice transparente. BloodSTOP iX favorise la coagulation sanguine et la cicatrisation de la plaie. La surface du gel transparente facilite la surveillance de l'hémostase, ce qui permet au chirurgien-dentiste de se concentrer sur le patient sans craindre des saignements involontaires.

1,3 x 5 cm (24 pièces)

CI-B01

Accessoires

 <p>Passeport implantaire 10 pièces/pack</p> <p>ZIPFR10</p>	<p>Boîte de présentation velours pour couronnes</p> <p>5050</p> 
 <p>Bain de bouche moussant alfa Découvrez le bain de bouche moussant, en douceur, parfait pour une utilisation immédiate après une extraction dentaire ou implantation dentaire. Composé d'arôme de menthe naturel auquel s'ajoute les graines de lin et l'allantoïne, il aide à prévenir l'expulsion des caillots sanguins et la sécheresse de l'alvéole après une extraction dentaire. Il ne provoque aucune brûlure buccale. Sa formule (sans alcool, de 0,2% de chlorhexidine) est à la base végétale avec des plantes médicinales telles que l'arnica, la camomille, le romarin, et la sauge. Ce bain de bouche présente des propriétés anti-inflammatoires et favorise la cicatrisation des plaies.</p> <p>100 ml</p> <p>CI010</p>	

Heydent

Composites



HeyTec-N

Le composite nano-hybride HeyTec-N est si pratique et facile à former que sa consistance est qualifiée de « cireuse ». HeyTec-N permet de réaliser des obturations très esthétiques et garantit des propriétés mécaniques fiables à long terme. HeyTec-N impressionne tous les praticiens. La consistance cireuse unique facilite une application aisée du matériau, qui ne colle pas aux instruments.

A1 – 1 x 4g seringue **HE311**

A2 – 1 x 4g seringue **HE312**

A3 – 1 x 4g seringue **HE313**

Incisal – 1 x 4g seringue **HE321**



HeyTec-Flow V

HeyTec-Flow V est un composite micro-hybride photopolymérisable et légèrement fluide pour les restaurations antérieures et postérieures limitées ainsi que pour le scellement des dents (puits et fissures). Il est fondé sur une résine méthacrylate et de charges inorganiques d'une taille de particule de 0,05–1 µm. Le contenu total de l'obturation est de 61 % (pourcentage en poids) et de 41 % (pourcentage en volume). HeyTec-Flow V répond aux exigences de DIN EN ISO 4049.

Indications : obturations des classes III, IV, et V selon Black-Sealants.

A1 – 1 x 2ml seringue **HE611**

A2 – 1 x 2ml seringue **HE612**

A3 – 1 x 2ml seringue **HE613**

Adhésifs



H-Etchbond

Système adhésif monocomposant, monocouche, et photopolymérisable de la 7^e génération. Conçu pour faciliter la procédure de collage et assurer une liaison solide d'une haute qualité. Parmi les systèmes Selfetch (auto-mordants) les plus utilisés, H-Etchbond offre d'excellentes propriétés adhésives. Une seule couche H-Etchbond est nécessaire pour obtenir une liaison solide et durable des composites photopolymérisables avec l'émail et la dentine.

1 x bouteille à 5 ml

HE003



H-Bond & H-Bond Activator

H-Bond est un système photopolymérisable de type Prime/Bond de la 5^e génération, offrant une liaison solide entre tous les matériaux composites et la dentine ainsi que l'émail. H-Bond a été conçu pour des matériaux photopolymérisables, mais lorsqu'il est combiné avec H-Bond Activator, il devient un système à polymérisation chimique ou duale, idéal pour les canaux radiculaires. Il peut également être utilisé avec des matériaux à polymérisation chimique et duale.

1 x bouteille à 5 ml H-Bond **HE001**

1 x bouteille à 3 ml H-Bond Activator **HE002**

Matériau temporaire



HeyTec Temp

Matériau provisoire de couronne et de bridge, un composite hautement esthétique 4:1 pour des couronnes, bridges, inlays, onlays, et facettes provisoires

Propriétés : grande résistance aux fractures, également dans le cas de couches très fines, comme les bords des couronnes ou des facettes fines, une apparence très esthétique, avec une excellente stabilité des couleurs et une fluorescence naturelle, l'utilisation directe au fauteuil à basse température de durcissement, une très grande résistance mécanique, une excellente élasticité, un excellent ajustement avec retrait de polymérisation minime, matériau de nouvelle génération avec rapport de mélange 4:1, grande résistance à l'abrasion, excellent polissage, optimal pour les bridges à longue portée durables, une maniabilité simple et rapide avec le système AutoMix, préparation finale en 5 min.

A2, 1 x 50 ml, 10 embouts mélangeurs 4:1

HE056



HeyTec Semi

Ciment provisoire

HeyTec Semi est un matériau semi-permanent à double durcissement conçu pour le scellement des couronnes et bridges sur les piliers implantaires et les moignons dentaires naturels, offrant les avantages suivants :

Formation de la gencive ou modelage des papilles dentaires, traitement de la périimplantite, nettoyage d'une restauration en dehors de la bouche, réparation de la construction, ou changement de couleur

La suppression de l'adhésion chimique (0 MPa) est compensée par une expansion du ciment contrôlée. Cela garantit une fixation optimale tout en permettant le retrait des prothèses sans risque de dommage.

1 x 5 ml seringue, 5 embouts mélangeurs

HE032

Vernis protecteur



H-Nano SEAL

Un vernis protecteur innovant, à la base d'un polymère de silicone protégé par un brevet. H-Nano Seal adhère fortement sur l'émail ou la dentine. Aucun mordantage préalable n'est nécessaire. Grâce à sa formule innovante, le matériau reste sur la surface de la dent pendant environ 12 mois. Prophylaxie des caries pour les enfants et les adultes ainsi que pour les patients portant un appareil dentaire fixe et pour les patients nécessitant des soins particuliers, traitement des dents après un nettoyage professionnel, protection des dents après un blanchiment des dents au cabinet dentaire et à domicile, réduction de l'hypersensibilité dans les zones du collet dentaire, reminéralisation des tissus durs des dents et comblement des microfractures de l'émail, scellement provisoire des obturations et des prothèses dentaires.

1 x 5 ml bouteille, 20 x pinceaux à usage unique
1 x plateau

HD008

Blanchiment



JW NEXT Power Bleaching

Gel In-Office Bleaching à deux composants dans une cartouche Automix avec 35% de peroxyde d'hydrogène concentré, pour le blanchiment très efficace des dents décolorées et devitalisées. JW Power Bleaching Next peut être utilisé sans source de lumière. Une lampe de blanchiment ou une diode laser permet de renforcer la capacité de blanchiment. Avantages : Résultats de blanchiment rapide, sûrs et durables, doux pour la surface dentaire, garantit les meilleurs résultats et une sûreté maximum, protection soigneuse des dents, pas d'endommagement de la surface dentaire, pas d'écoulement et un bon contraste de la dent, le mélange n'est plus nécessaire, qualité constante, produit médical au lieu d'un produit cosmétique. Ne relève pas de la nouvelle réglementation cosmétique. 1 x 5 g seringue, 3 x embouts mélangeurs, 1 x Liquid Dam 1,2ml, 1 x embout

HE1020JW

Ciments et reconstruction des moignons



HeyTec Cem SE

HeyTec Cem SE est un matériau composite auto-mordant à double durcissement pour la fixation permanente des couronnes, bridges, des restaurations de type inlay/onlay, et des pivots radiculaires. HeyTec Cem SE adhère bien à la dentine, à l'émail, au zircon (16 MPa!), à la céramique, au composite, au titane, et au métal. Forte adhésion sans mordantage, couche primaire, et de collage. Le scellement se fait en quelques étapes. Il n'y a aucun risque d'erreur lié à un mordantage excessif. HeyTec CEM SE est auto-neutralisant avec un pH initial bas. Immédiatement après l'application, le pH augmente à 5,5 après 12 heures. Ainsi, cela évite une hypersensibilité après le traitement.

1 x seringue à 5 ml, 10 x embouts mélangeurs, 5 x embouts intraoraux longs

HE031TR



HeyTec CemX

HeyTec CemX est un ciment composite à durcissement dual autoadhésif, fluide, et fluorescent radio-opaque, offrant une résistance élevée à l'usure. Il couvre un large spectre d'indications, incluant les inlays en tout-céramique, en matériau composite, ou en métal, les onlays, les couronnes et bridges, les tenons, les bridges inlays/onlays de 3 unités, le tout-céramique, les bridges Maryland de 2 ou 3 éléments ainsi que pour les facettes. HeyTec CemX peut également être utilisé pour la reconstruction des moignons. Nouvelle génération des ciments composites autoadhésifs. Administration simple et efficace dans une seringue Automix.

1 x seringue à 8 g, 5 x mélangeurs ML, 5 x embouts mélangeurs, 5 x embouts intraoraux

Semi-transparent – 1 x seringue à 8 g **HE033**

A2 – 1 x seringue à 8 g **HE035**



HeyTec Core-N

HeyTec Core-N est un composite microhybride fluide, hautement radio-opaque, à polymérisation duale, contenant des nanocharges (nano-zircone, nano-fluorure de calcium). Il est conçu pour la reconstruction des moignons et le scellement des pivots radiculaires. Ses excellentes propriétés mécaniques permettent une préparation plus précise des couronnes. HeyTec Core-N peut également être utilisé pour le scellement des couronnes, bridges, inlays et onlays.

1 x seringue à 5 ml, 5 x embouts mélangeurs, 5 x IOT long, 5 x IOT court

HE049

Nanotechnologie

Grâce à sa structure moléculaire innovante, HeyTec Core-N possède des propriétés mécaniques exceptionnelles. Il offre une résistance élevée à la compression et à la flexion, ce qui en fait une alternative idéale à la dentine naturelle.

Traitement sûr et fiable

HeyTec Core-N s'applique directement et présente un temps de durcissement court avec une faible production de chaleur. Ses propriétés de polymérisation duale permettent le scellement et la reconstruction des moignons, même en l'absence d'une exposition lumineuse suffisante.

Reminéralisation de la dentine et radio-opacité

Les nano-particules de fluorure de calcium favorisent la reminéralisation de la dentine. Les particules nano-zircone assurent une radio-opacité optimale.

Matériau d'empreinte



HeyTec Soft

A-silicone malléable pour technique de double mélange

HeyTec Soft possède une consistance de mélange particulièrement souple. L'empreinte est réalisée sans pression de compression excessive et peut être prise avec un porte-empreinte préfabriqué ou individuel.

Consistance: putty, couleur: jaune, retrait linéaire: < 0,1%, temps de mélange: 45 s., temps de travail : 2:20 min, temps de durcissement (en bouche): < 3:00 min, dureté finale : environ 65 Shore A, norme: ISO 4823, type 0
2 x 300 ml doses A + B, 2 x cuillères

HD060



HeyTec Mono-X

A-silicone de précision monophasé avec une excellente stabilité et précision d'image exceptionnelle

Champs d'application : inlay-onlay, couronnes et bridges, empreintes de fixation, restaurations télescopiques et à attachements, et empreintes d'implants complexes.

Consistance : heavy, couleur: aubergine, retrait linéaire : < 0,1%, temps de mélange : inapplicable, temps de travail : 2:00 min., temps de durcissement (en bouche) : < 3:00 min., dureté finale : environ 70 Shore A, norme : ISO 4823, type 1

1 x 380 ml 5:1 cartouche, 10 embouts mélangeurs

HD064



HeyTec Heavy-X

Matériau d'empreinte de précision pour mélange mécanique, dynamique

HeyTec Heavy-X est adapté à toutes les techniques d'empreinte de précision, où d'excellentes propriétés hydrophiles, une grande précision dimensionnelle, une résistance élevée à la déchirure, et une forte résilience sont essentielles. Champ d'application : matériau de pré-empreinte pour toute technique d'empreinte biphasée

Consistance : heavy, couleur: jaune, retrait linéaire : < 0,1 %, temps de mélange : inapplicable, temps de traitement : 1:30 min., temps de durcissement (en bouche) : < 2:30 min., dureté finale : environ 65 Shore A, norme : ISO 4823, type 1
1 x 380 ml 5:1 cartouche, 10 embouts mélangeurs

HD065



HeyTec Light-H

Matériau d'empreinte de correction, à polymérisation par addition, très fluide et super-hydrophile, adapté à toutes les techniques d'empreinte. Il s'écoule sur toutes les zones critiques sans inclure d'air et reproduit fidèlement les contours fins. Grâce à la pression de compression et à ses propriétés super-hydrophiles, les résidus liquides sont évacués. Son caractère thixotrope empêche tout écoulement accidentel du matériau déjà appliqué sur la préparation.

Consistance : putty, couleur: jaune, retrait linéaire : < 0,1 %, temps de mélange : 45 s., temps de traitement : 2:20 min., temps de durcissement (en bouche) : < 3:00 min., dureté finale : environ 65 Shore A, norme : ISO 4823, type 0

2 x 50 ml cartouche, 12 embouts mélangeurs

HD061



HeyTec Bite

Silicone super dur, à polymérisation par addition, à durcissement rapide, pour enregistrement occlusal. Avec une dureté finale d'environ 90 Shore A, ce matériau est idéal non seulement pour l'enregistrement des mâchoires entièrement ou partiellement édentées, mais aussi pour l'enregistrement occlusal en prothèse complète. Il peut être usiné sans difficulté à l'aide d'un couteau, d'une pierre ou d'une fraise.

Consistance : heavy, couleur: magenta, retrait linéaire : < 0,1 %, temps de mélange : inapplicable, temps de traitement : 15 s., temps de durcissement (en bouche) : < 45 s., dureté finale : environ 90 Shore A, norme : ISO 4823, type 1
2 x 50 ml cartouche, 12 embouts mélangeurs

HD080



HeyTec Adhesive

Adhésif fluide, compatible avec tous les A-silicones courants
1 x 10 ml

HD062

CHAMPIONS 

CHAMPIONS-IMPLANTS.COM

