



PRODUKTINFORMATION

PRODUCT INFORMATION
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
INFORMACJE O PRODUKCIE

Schleimhautstanze

Mucosal Punch | Mucotome
Narzędzie do wycinania dziąsła

CHAMPIONS 



ø 4,0 mm
REF 3088



ø 5,0 mm
REF 3089

DE

Die Schleimhautstanze in das Winkelstück einsetzen. Mit einer Geschwindigkeit von max. 250 U/min durch das Weichgewebe bis zum Alveolarkamm schneiden. Eventuell mit einem Skalpell oder Raspatorium den Gewebestopfen vom Alveolarkamm lösen.

Material: Edelstahl

EN

Insert the Mucosal Punch in the handpiece. Cut through the soft tissue up to the alveolar ridge at a maximum speed of 250 rpm. Eventually, detach the tissue plug from the alveolar ridge by using a scalpel or a raspatory.

Material: stainless steel

FR

Insérez le mucotome dans le contre-angle. Réalisez votre punch gingival jusqu'à la crête alvéolaire avec une vitesse maximale de 250 rpm. Éventuellement, achevez le prélèvement de la rondelle de gencive avec un scalpel ou une rugine.

Matériel: acier inoxydable

PL

Narzędzie do wycinania dziąsła osadzamy na kątnicy. Do wycinania tkanek miękkich wyrostka żąbodołowego z max.prędkością 250 obr./min. W razie potrzeby można odseperować wycięty fragment z wyrostka żąbodołowego za pomocą skalpela lub raspatora.

Materiał: stal nierdzewna

Hersteller in der EU | Manufacturer in the EU

Fabricant dans l'UE | Producent w UE:

Champions-Implants GmbH

Geschäftsführer | Managing Director | Direction | Dyrektor zarządzający:

Dr. med. dent. Armin Nedjat

Im Baumfeld 30 | Champions Platz 1

D-55237 Flonheim

Deutschland | Germany | Allemagne | Niemcy

Tel. +49 (0) 6734 91 40 80 | Fax +49 (0) 6734 10 53

info@champions-implants.com

champions-implants.com

CE 0297

Champions® ist ein eingetragenes Warenzeichen
der Champions-Implants GmbH

Champions® is a registered trademark of
Champions-Implants GmbH

Champions® est une marque déposée
de Champions-Implants GmbH

Champions® jest zastrzeżonym znakiem towarowym
firmy Champions-Implants GmbH