



PRODUKTINFORMATION

PRODUCT INFORMATION
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
INFORMACJE O PRODUKCIE

Shuttle-Abzieher

Shuttle Extractor | Outil de désinsertion du Shuttle
Użytku Shuttle-sciągacza

CHAMPIONS 



REF 3087



REF 3087L

DE

Der Shuttle-Abzieher (Abb. 1) funktioniert nur bei Shuttles mit einer Außenrinne (Abb. 2). Bitte den Abzieher nur von Hand im Uhrzeigersinn eindrehen. Ratsche nur verwenden, wenn der Shuttle durch Eindrehen von Hand nicht lösbar ist.

EN

The Shuttle-Extractor (Fig. 1) can only be used for Shuttles with an outer groove (Fig. 2). Manually screw in the Shuttle-Extractor clockwise. Only use the Torque Wrench when the Shuttle cannot be manually removed.

FR

L'outil de désinsertion du Shuttle (Fig. 1) peut seulement être utilisé pour un Shuttle avec une seule rainure extérieure! (Fig. 2). Vissez l'outil de désinsertion du Shuttle manuellement dans le sens du vissage. Utilisez la clé dynamométrique seulement lorsque le Shuttle ne peut pas être enlevé manuellement.

PL

Shuttle ściągacz (Rys. 1) stosować tylko do Shuttle z zewnętrznym rowkiem (Rys. 2). Proszę wkręcać ręcznie w kierunku wskazówek zegara. Z raczety korzystać tylko wtedy, jeśli ręczne wkręcanie nie będzie możliwe.

Abb./Fig./Rys. 1

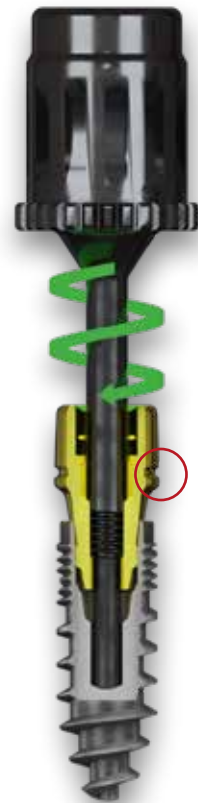


Abb./Fig./Rys. 2

Hersteller in der EU | Manufacturer in the EU

Fabricant dans l'UE | Producent w UE:

Champions-Implants GmbH

Geschäftsführer | Managing Director | Direction | Dyrektor zarządzający:

Dr. med. dent. Armin Nedjat

Im Baumfeld 30 | Champions Platz 1

D-55237 Flonheim

Deutschland | Germany | Allemagne | Niemcy

Tel. +49 (0) 6734 91 40 80 | Fax +49 (0) 6734 10 53

info@champions-implants.com

champions-implants.com

CE 0297

Champions® ist ein eingetragenes Warenzeichen
der Champions-Implants GmbH

Champions® is a registered trademark of
Champions-Implants GmbH

Champions® est une marque déposée
de Champions-Implants GmbH

Champions® jest zastrzeżonym znakiem towarowym
firmy Champions-Implants GmbH